



คู่มือการใช้งานอุปกรณ์แนะนำการกู้ชีพเบื้องต้น รุ่น RH 112

โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนใช้งาน สังเกตคำเตือนและหมายเหตุด้านความปลอดภัย เก็บรักษาสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป และทำให้ผู้อื่นใช้งานได้ หากส่งต่ออุปกรณ์ ให้ระบุคำแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้งานรายถัดไปได้

1. อุปกรณ์ภายในกล่อง

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ภายนอกสำหรับการจัดส่งด้วยกระดาษแข็งไม่บุบสลาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน ก่อนการใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้ และนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก หากมีข้อสงสัย อย่าใช้อุปกรณ์และติดต่อผู้ปลีกลหรือที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

- 1x LifePad®
- 1x คำแนะนำสำหรับการใช้งานเหล่านี้
- 1x คำแนะนำสั้น ๆ

2. เครื่องหมายและสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ปรากฏในคำแนะนำสำหรับการใช้งาน บนอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์และป้ายบอกประเภทของอุปกรณ์ :

	คำเตือน คำแนะนำเพื่อเตือนว่าอุปกรณ์อาจเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความบาดเจ็บได้
	สำคัญ บันทึกความปลอดภัยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม
	<u>ใช้ครั้งเดียว ไม่เหมาะสำหรับใช้ซ้ำ</u>
	ผู้ผลิต
	ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากสวิต
	ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำ (UDI) ตัวระบุสำหรับการระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน
	หมายเลขซีเรียล
	ระดับการป้องกัน ป้องกันวัตถุแปลกปลอมที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ 1 มม. และกันน้ำกระเซ็น
	ขีดจำกัดอุณหภูมิ ค่าขีดจำกัดอุณหภูมิที่สามารถสัมผัสเครื่องมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัยจะถูกระบุ

	ความชื้นจำกัด ระบุช่วงความชื้นที่อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถสัมผัสได้อย่างปลอดภัย
	การกำจัด การกำจัดตามข้อกำหนด EC ของเสียอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – WEEE
	กระแสดตรง อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับกระแสดตรงเท่านั้น
	ทิ้งบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	แยกส่วนประกอบอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์และกำจัดทิ้งตามระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่น
	บริการคำแนะนำการใช้งาน
	ข้อมูลสินค้า หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ
	ใช้งานโดย
	เครื่องมือแพทย์
	หมายเลขสินค้า
	เลขการผลิต
	ส่วนที่ใช้ CF แบบป้องกันการกระตุกหัวใจ
	การติดฉลาก CE อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของคำสั่งยุโรปและระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
	การจำกัดความกดอากาศ ระบุช่วงของความดันบรรยากาศที่อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถสัมผัสได้อย่างปลอดภัย
	การกำจัดแบตเตอรี่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่มีสารอันตรายกับขยะในครัวเรือน
	การทำเครื่องหมายเพื่อระบุวัสดุบรรจุภัณฑ์ A = วัสดุ B = หมายเลขวัสดุ: 1-7 = พลาสติก 20-22 = กระดาษและกระดาษแข็ง

3. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ LifePad® เพื่อวัตถุประสงค์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้งานในลักษณะที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น

วัตถุประสงค์การใช้งาน

LifePad® กระตุ้นและสนับสนุนผู้ปฐมพยาบาลในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ของบุคคลที่มีอายุมากกว่า 12 ปี หลังจากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน (SCA) ผ่านระบบ

การตอบสนองด้วยเสียงและภาพเพื่อประเมินการกดหน้าอก LifePad® มีไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น และห้ามใช้หลายครั้งไม่ว่าในกรณีใด ๆ

กลุ่มผู้ใช้งาน

LifePad® ได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับวัยรุ่นที่อายุมากกว่า 12 ปีและผู้ใหญ่ทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะหรือมีความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพในการใช้อุปกรณ์

ประโยชน์ทางคลินิก

LifePad® ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายแค่เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นต้นเท่านั้น แต่ช่วยผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำ CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) ในการช่วยชีวิต

ข้อบ่งชี้

ควรใช้ LifePad® ในการกู้ชีพเป็นอันดับแรกในผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้น

ข้อห้าม

- อย่าใช้ LifePad® หากผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างเห็นได้ชัด
- อย่าใช้ LifePad® หากคุณแน่ใจว่าผู้ป่วยหายใจได้ตามปกติ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มี การตอบสนองก็ตาม
- ห้ามใช้ LifePad® กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี

4. คำเตือนและหมายเหตุเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนทั่วไป

- แม้ว่าการช่วยชีวิตจะเริ่มขึ้นทันที แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าผู้ป่วยจะรอดชีวิตได้ แม้ว่าจะได้รับการดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้วก็ตาม ในบางกรณี ปัญหาพื้นฐานที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหมายความว่าผู้ป่วยจะไม่รอดแม้จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
- ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส หากไม่ใช่ LifePad® บุคคลทั่วไป (ผู้ใช้) ไม่ควรควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่อื่น

- การบีบหัวใจโดยใช้ LifePad® หรือไม่ใช่ก็ตาม จะมีประสิทธิภาพน้อยถ้าหากผู้ป่วยนอนบริเวณพื้นนุ่ม
- อาจส่งผลทำให้กระดูกซี่โครงหักและการบาดเจ็บอื่น ๆ เป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการประเมินอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- นอกจากผลที่กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดรอยดลอกที่ผิวหนัง รอยฟกช้ำ และบาดแผลบริเวณหน้าอกได้ในระหว่างการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างไรก็ตามอย่าหยุดทำการ CPR จนกว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึง
- ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ของการปฐมพยาบาลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น คือ

- ชี้อวัยวะ
- กระตุกอกหัก
- ภาวะถุงลมในปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ (ปอดแฟบ)
- การขูดตัวของปอด
- ภาวะมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ภาวะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ปอดติดเชื้อ

• ทำการรักษาทันที โดยไม่ต้องทราบอายุที่แน่นอนของผู้ป่วย

• ตรวจสอบพื้นผิว LifePad® ก่อนเริ่มการช่วยชีวิต เพื่อป้องกันขอบแหลมคมหรือบริเวณที่เป็นอันตราย

• ในกรณีที่ LifePad® มีข้อบกพร่องให้ทำการบีบหัวใจทันที โดยไม่ต้องใช้ LifePad® อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นการปฐมพยาบาลโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำ CPR ที่แสดงในอุปกรณ์นี้

• แม้ว่าอุปกรณ์จะไม่ทำงาน ให้บีบหัวใจต่อด้วยความถี่อย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที จนมองเห็นสัญญาณชีพที่ชัดเจนอีกครั้ง หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้ารับการช่วยเหลือ โดยการกดหน้าอกลึก 50 มม. ถึง 60 มม.

• LifePad® มีไว้เพื่อช่วยในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น (ที่ได้รับการแจ้งเตือน)

และไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์

• LifePad® ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาล

แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องนี้ได้

• เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็ก มีความเสี่ยงที่จะหายใจไม่ออก

• LifePad® ไม่ใช่ของเล่น เก็บ LifePad® ให้พ้นมือเด็ก

• เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าแรงสูง เช่น อุปกรณ์ขัดข้อง ห้ามใช้ LifePad® ใกล้กับสัญญาณความถี่ที่แรงสูงหรือเครื่องมือ HF แบบพกพาและ/หรือแบบเคลื่อนที่

• การใช้อุปกรณ์เสริม คอนเวอเตอร์ และสายเคเบิลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้สำหรับ LifePad® อาจส่งผลให้มีการปล่อย HF เพิ่มขึ้นหรือการด้านทานของ LifePad® ลดลง

• เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้อายุการใช้งาน LifePad® สั้นลง โดยไม่จำเป็น ให้เปิดเครื่องเมื่อการรักษายูป่วยเท่านั้น

• หากคุณดึงแถบแบตเตอรี่ออกก่อนการใช้งานจริง จะไม่สามารถรับประกันอายุแบตเตอรี่ได้อีกต่อไป

• หากใช้ LifePad® ร่วมกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของเครื่องกระตุ้นหัวใจ

• โปรดรายงานการใช้งานหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไปยังผู้ผลิต

• อุปกรณ์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ที่มีสารผสมยาชาติคิดไฟได้กับอากาศ

ออกซิเจน หรือไนโตรเจนโปรทอกไซด์

• อุปกรณ์ไม่มีฟังก์ชัน ECG

⚠ ข้อควรระวังทั่วไป

• LifePad® มีไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น จึงไม่เหมาะสำหรับการใช้ซ้ำ:

- หลังจากใช้งานครั้งเดียวและการปิดวงจรที่เกี่ยวข้องผ่านการดึงแบตเตอรี่ แถบแบตเตอรี่ที่ให้มาหมด ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถมั่นใจได้อีกต่อไปว่าสามารถใช้อุปกรณ์ได้อีกครั้งในภายหลัง

- นอกจากนี้ อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้กับบุคคลอื่นได้ ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย

เนื่องจากไม่สามารถฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดได้

• ปกป้อง LifePad® จากการกระแทก ความชื้น ฝุ่น สารเคมี อุณหภูมิที่ผันผวนอย่าง

รุนแรง แสงแดดโดยตรง น้ำ ทราข และแหล่งความร้อนที่อยู่ใกล้เกินไป (เตาอบหรือเครื่องทำความร้อน) เนื่องจากจะไม่รับประกันการทำงานที่ไร้ข้อผิดพลาดของ LifePad® อีก

• ไม่ควรเปิดหรือซ่อมแซม LifePad® ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะหลังจากนั้นจะไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ผิดพลาดได้อีกต่อไป และคุณอาจได้รับไฟฟ้าช็อคเนื่องจาก LifePad® ไม่สามารถบำรุงรักษาและ/หรือปรับเทียบได้

• อย่าใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมที่ผู้ผลิตไม่แนะนำเป็นเครื่องประดับ

• หากคุณพบเห็นหรือสงสัยว่า LifePad® เกิดความเสียหายคุณต้องเปลี่ยน

LifePad® ใหม่

• LifePad® ป้องกันน้ำกระเซ็น อย่างไรก็ตาม LifePad® ลงในน้ำ

⚠ ข้อควรทราบเกี่ยวกับการจัดการแบตเตอรี่

• หากผิวหนังหรือดวงตาของคุณสัมผัสกับของเหลวจากแบตเตอรี่ ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำและพบแพทย์เพื่อทำการรักษา

• อันตรายจากการสำลัก! เด็กเล็กอาจกลืนและสำลักแบตเตอรี่ ดังนั้นควรเก็บ

แบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กเล็ก

• สังเกตเครื่องหมายบวก (+) และลบ (-)

• หากแบตเตอรี่รั่ว ให้สวมถุงมือป้องกันและทำความสะอาดช่องใส่แบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้ง

• ปกป้องแบตเตอรี่จากความร้อนที่มากเกินไป

• อย่าโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ เสี่ยงต่อการระเบิด!

• ห้ามชาร์จหรือลิควจรแบตเตอรี่

• ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

• ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน เปิด หรือบคแบตเตอรี่

• แบตเตอรี่ต้องเป็นไปตาม IEC 60086-4

5.การจัดเก็บ

⚠ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง

• จัดเก็บ LifePad® ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง โดยไม่มีแรงดันจากภายนอก

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

• LifePad® ต้องไม่่งอหรือรับแรงกดจากภายนอกอื่น ๆ ระหว่างการจัดเก็บ ซึ่งอาจทำ

ให้เซ็นเซอร์แรงกดเสียหายได้

• เมื่อจัดเก็บ LifePad® ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าไม่เกินวันหมดอายุของ

อุปกรณ์ กรณีนี้ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันที

6.รายละเอียดอุปกรณ์

อุปกรณ์จะแสดงในหน้าพับ

1 ปุ่มเปิด/ปิด (เมื่อถอดแถบแบตเตอรี่ออก: กดแบบสั้น -> เปิด / กดแบบยาว -> ปิด) / ปุ่มปิดเสียง (กดสั้น ๆ อีกครั้งหลังจากเปิด -> ปิดเสียง)

2 ระบบไฟ (LED) ป้อนกลับ

3 แถบแบตเตอรี่

4 เซ็นเซอร์แรงกด

7. จะทำอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน ?

ภาพที่เกี่ยวข้องจะแสดงในหน้าพับ

A การตรวจสอบสติและการหายใจ

ตรวจสอบว่าผู้ป่วยตอบสนองหรือไม่ โดยการเขย่าที่ไหล่ และถามเสียงดังว่า “คุณ ๆ เป็นอะไรหรือเปล่าคะ/ครับ” หากผู้ป่วยตอบสนองให้สอบถามอาการและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากจำเป็น แต่หากไม่ตอบสนอง ให้ตรวจสอบการหายใจโดยการมอง การได้ยิน และการสัมผัสโดยการพลิกตัวผู้ป่วยให้หงายขึ้น ตรวจสอบช่องปากเพื่อหาวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอม ถ้ามีให้นำออก วางมือบนหน้าผากของพวกเขาและค่อยๆ เอียงศีรษะไปข้างหลังโดยใช้ปลายนิ้วอีกข้างหนึ่ง เพื่อเปิดทางเดินหายใจ หาก你不แน่ใจว่าการหายใจเป็นปกติหรือไม่ ให้ทำงานบนพื้นฐานที่ไม่ปกติและเริ่มการช่วยชีวิต การหายใจหอบ หายใจมีเสียงหวีด หรือหายใจคั้น ไม่ควรถือเป็นการหายใจปกติ

B โทรฉุกเฉิน

หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองและไม่หายใจตามปกติ ให้แจ้งบริการฉุกเฉินทันที (โทร.1669)

C เปิดร่างกายส่วนบน

ถอดเสื้อผ้าเพื่อเปิดเผยร่างกายส่วนบนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยนอนอยู่บนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ โดย LifePad® จะต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง

D ตำแหน่งการวาง LifePad®

วาง LifePad® ไว้บนร่างกายส่วนบนที่เปลือยเปล่าของผู้ป่วยตามที่แสดง จัดตำแหน่งอุปกรณ์โดยใช้สีแดงเป็นเส้นอ้างอิง ควรวาง LifePad® ไว้ที่ส่วนบนของร่างกายผู้ป่วย โดยให้เส้นสีแดงแนวตั้งอยู่ตรงกลางของร่างกาย และขอบด้านล่างของอุปกรณ์อยู่ในแนวเดียวกับกระดูกอก(กระดูกหน้าอก) โดยให้เซ็นเซอร์แรงกด**4**อยู่ในครึ่งล่างของกระดูกอก

E ดึงแถบที่แบตเตอรี่ออก

จากนั้นดึงแถบที่แบตเตอรี่ **3** ออกจากถ่วงจนสุดเพื่อเปิดใช้งาน LifePad® สัญญาณเสียงแจ้งเตือนเริ่มส่งเสียงบน LifePad®

F วางมือบนตัวผู้ป่วย

คุกเข่าข้างผู้ป่วย วางมือลงที่เซ็นเซอร์ตำแหน่ง **4** และประสานมืออีกข้างเข้ากับมือข้างตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้กดที่ซี่โครงของผู้ป่วยและอย่ากดทับที่ช่องท้องส่วนบน

G เริ่มการกดหน้าอก

วางไหล่ในแนวตั้งเหนือหน้าอกของผู้ป่วยแล้วขีดแขนออก ตอนนี้เริ่มบีบหัวใจตามจังหวะของสัญญาณเสียงแจ้งเตือน ทุกครั้งที่มีเสียง บีบ ให้กดกระดูกหน้าอกลงอย่างน้อย 5 ซม. แต่ไม่เกิน 6 ซม. ระบบไฟ (LED) ป้อนกลับ **2** จะบอกคุณว่าคุณกำลังออกแรงกดเพียงพอหรือไม่ เมื่อคุณกำลังใช้แรงกดที่หน้าอกเพียงพอ ไฟ LED ทั้งหมดจะสว่างที่ละดวงโดยเรียงลำดับจากสีส้มเป็นสีเขียว หากคุณทำให้ไฟ LED สีส้มหรือไฟ LED สีเหลืองส่องดวงสว่างขึ้น แสดงว่าคุณกำลังใช้แรงกดไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มแรงกดสำหรับการกดครั้งต่อไปจนกว่าไฟ LED ทั้งหมดจะสว่างขึ้น

H การปล่อยแรงกดหน้าอก

การปล่อยแรงกดหน้าอกจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ หลังจากที่เกิดหน้าอกแล้วปล่อย โดยที่มีมือข้างสัมผัสกับเซ็นเซอร์แรงกด 4 ตลอดเวลา ระบบไฟ(LED) ป้อนกลับ 2 ช่วยให้ผู้ใช้คุณประเมินสิ่งนี้ได้ หลังจากการกดแต่ละครั้ง ให้ปล่อยหน้าอกจนกว่าไฟ LED จะดับลงทีละดวงโดยเรียงจากมากไปน้อย จากสีเขียวเป็นสีส้มจนกว่าไฟ LED สีส้มจะสว่างขึ้นเท่านั้น หากไฟ LED สีเขียวและสีเหลืองดับไม่สนิท แสดงว่าหน้าอกยังไม่ถูกปล่อยออกอย่างเพียงพอ ในระหว่างการกดครั้งต่อ ๆ ไป ให้ปล่อยหน้าอกให้มากขึ้นจนกว่าไฟ LED ทั้งหมด ชกเว้นไฟ LED สีส้มจะดับ ทำซ้ำ ขั้นตอน G และ H ตามจังหวะของสัญญาณเสียงเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถี่ 100 ครั้งต่อนาที ทำการบีบหัวใจจนมีสัญญาณชีพที่ชัดเจนอีกครั้ง หรือจนกว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะเข้าช่วยเหลือ (สัญญาณชีพที่ชัดเจน ลิ้มตา ตื่น เคลื่อนไหว และเริ่มหายใจตามปกติ) หากคุณได้รับการฝึกฝนมาแล้ว คุณสามารถเป่าปาก 2 ครั้งหลังจากการกดหน้าอก 30 ครั้ง

I ปิดใช้งานสัญญาณเสียง (ทางเลือก)

คุณสามารถปิดใช้งานสัญญาณเสียงได้ตลอดเวลาเมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด/ปิด 1 อีกครั้ง สิ่งนี้มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หากมีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากมันยังส่งสัญญาณเสียง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้สัญญาณเสียงได้อีกในครั้งต่อไป

8. การกำจัด

ห้ามทิ้งอุปกรณ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนเมื่อหมดอายุการใช้งาน
 ทิ้งอุปกรณ์ที่จุกจุกรวบรวมหรือรีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสมในประเทศของคุณ
 ทิ้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะ



เมื่อทิ้ง LifePad® ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดแบตเตอรี่ออกแล้วแยกจากกัน

การทิ้งแบตเตอรี่

- จะต้องไม่ทิ้งแบตเตอรี่ลงในขยะในครัวเรือน อาจมีโลหะหนักที่เป็นพิษและต้องได้รับการปฏิบัติพิเศษ
- รหัสด้านล่างพิมพ์บนแบตเตอรี่ที่มีสารอันตราย:
 Pb = แบตเตอรี่ประกอบด้วยตะกั่ว
 Cd = แบตเตอรี่ประกอบด้วยแคดเมียม
 Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท

9. ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่ออุปกรณ์	LifePad®
รุ่น	RH 112
ขนาด	210 x 160 x 3 มม. (แผ่น) / 15 มม. (ตัวเรือน)
น้ำหนัก	130 กรัม
ระดับเสียง	≥37 (สูงสุด 66) dB

สภาพการทำงานที่อนุญาต	5°C ถึง 40°C ความชื้นสัมพัทธ์ 15 ถึง 93% ความดันบรรยากาศ 700–1060 hPa
การจัดเก็บและการขนส่งที่อนุญาต	5 °C ถึง 35 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 45–85% ความดันบรรยากาศ 700–1060 hPa
ระดับการป้องกัน	IP44
แหล่งจ่ายไฟ	1x CR2032 (3V)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	ใช้งานต่อเนื่องได้ 1 ชั่วโมง
ความถี่ของสัญญาณเสียง	100 bpm
วันหมดอายุ	(5 ปีหลังการผลิต)
อายุการใช้งานที่คาดหวัง	อุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
การจำแนกประเภท	การจ่ายไฟภายใน การทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนการใช้งานประเภท CF ที่ป้องกันการกระตุ้นหัวใจ (ด้านหลังของอุปกรณ์ถือเป็นส่วนที่ใช้ CF แบบป้องกันการกระตุ้นหัวใจ)

ข้อมูลทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น

หมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่อุปกรณ์หรือในช่องใส่แบตเตอรี่

- อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับระเบียบ (EU) 2017/745 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนข้อกำหนดระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
- อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป EN 60601-1 และ EN 60601-1-2 (สอดคล้องกับ CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) และอยู่ภายใต้ข้อควรระวังพิเศษ มาตรการเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า โปรดทราบว่า HF แบบพกพาและมือถือระบบสื่อสารอาจรบกวนอุปกรณ์นี้ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากที่อยู่บริการลูกค้าที่ให้บริการ

10. การรับประกันและการบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันและการรับประกันสามารถพบได้ในใบรับประกันที่ให้มา

สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ป่วยในสหภาพยุโรปและระบบการควบคุมที่เหมือนกัน (EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745) จะมีผลบังคับตั้งต่อไปนี้: หากเกิดเหตุการณ์สำคัญระหว่างหรือผ่านการใช้อุปกรณ์เกิดขึ้น แจ้งผู้ผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องอำนาจของรัฐสมาชิกที่ผู้ใช้/ผู้ป่วยตั้งอยู่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม fanpage : beurerthailand
 line : @cservice line : @beurerthai
 โทร. 038-314118

ผู้นำเข้า : บริษัท เบลแมกส์ไทย จำกัด
 สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า : 15/117 หมู่ 3 ซ.เท่ากิโย 23 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-280-5777