



เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

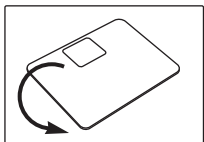


1. พลิกด้านหลังเครื่องเพื่อใส่ถ่าน AAA 1.5V จำนวน 3 ก้อน และ ทำการปิดฝาครอบถ่านให้เรียบร้อย



2. พลิกด้านหลังเลือกหน่วยการวัดให้เป็นกิโลกรัม, ปอนด์หรือสโตน โดยการกดปุ่ม Unit ที่ด้านหลังเครื่อง

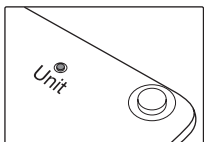


kg → lb → st

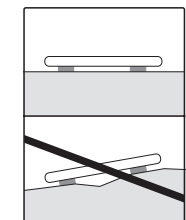


3. วางเครื่องชั่งบนพื้นราบและแข็ง ไม่แนะนำให้วางบนพื้นลามิเนต หรือ พรม


การแจ้งเตือนต่างๆ

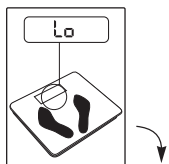

1. ถ่านหมด เปลี่ยนถ่านใหม่ (เปลี่ยนใหม่ทุกก้อน)

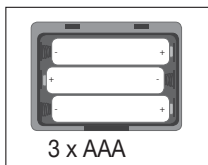


3 x AAA

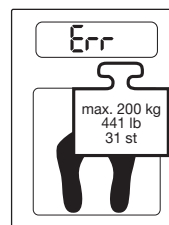


2. น้ำหนักเกินกำหนด


เริ่มต้นการใช้งาน

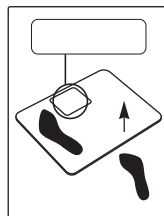

1. ก้าวเท้าขึ้นบนเครื่องชั่งน้ำหนัก *สำหรับการใช้งานครั้งแรกหรือเมื่อมีการย้ายตำแหน่งให้ชั่งซ้ำๆ ประมาณ 5 ครั้งเพื่อเป็นการ calibrate

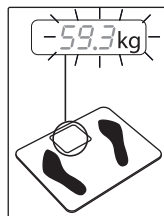


2. ยืนนิ่งๆ ขณะทำการชั่งน้ำหนัก

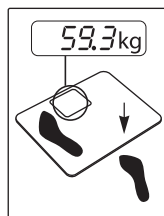




3. ค่าน้ำหนักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

*หมายเหตุ

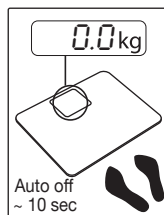

เครื่องชั่งจะปิดตัวอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาที (หากไม่มีการชั่งน้ำหนัก)

Tare ฟังก์ชัน

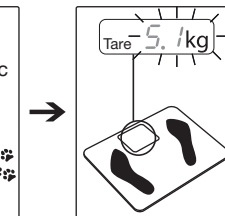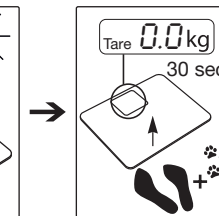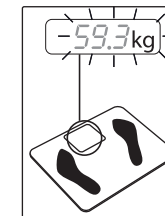

1. ขึ้นชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่ง จะปรากฏน้ำหนักบนเครื่องชั่ง
2. ลงจากเครื่องชั่ง รอประมาณ 5 วินาที หน้าจอแสดงผลจะปรากฏ "0.0 kg" และ สัญลักษณ์ Tare ทางด้านซ้ายมือ ให้ขึ้นชั่งอีกครั้งพร้อมวัตถุ (ภายใน 30 วินาที)
3. เครื่องชั่งจะปรากฏค่าน้ำหนัก ของวัตถุ บนหน้าจอ



beurer wellbeing
GS 340 XXL เครื่องชั่งน้ำหนัก
 Glass bathroom scale

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมคส์ไทย จำกัด
 สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 อ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์
 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777

