

BY80

เครื่องชั่งน้ำหนักทารก
ติดตามพัฒนาการลูกน้อย
ด้วยตัวคุณเอง



เครื่องชั่งน้ำหนักจะชั่งน้ำหนักได้
อยู่ในช่วงต่ำสุด 50 กรัม ถึงสูงสุด
20 กิโลกรัม โดยมีความละเอียด
ในแต่ละช่วงการวัดคือ 5 กรัม
*สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัด
เป็น หน่วย kg/lb/oz โดยกดปุ่ม
ด้านหลังเครื่องชั่ง



วางทารกบนแท่นรับน้ำหนัก อย่างระมัดระวัง
ไม่ให้ทารก ตกจากแท่นรับน้ำหนัก และควร
ดูแลพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนหัวของทารก



ปล่อยมือจากทารกขณะทำการชั่ง หน้าจอจะมีการ
กระพริบชั่วคราว แล้วน้ำหนักที่วัดได้จะแสดงที่หน้าจอ

หากทารกมีการเคลื่อนไหวไปมา ไม่หยุดนิ่ง จะทำให้เครื่องชั่งไม่สามารถอ่านค่าได้
ให้ผู้ใช้กดปุ่ม "HOLD" 1 ครั้ง แล้วเครื่องชั่งจะแสดงค่าที่อ่านได้ภายใน 3 วินาที



นำทารกออกจากเครื่องชั่ง
ประมาณ 20 วินาที
หน้าจอจะปิดอัตโนมัติ

หากต้องการวางผ้าขนหนูรองพื้น ก่อนชั่งทารก
สามารถวางผ้าก่อน แล้วรอจนกว่าตัวเลขจะ
หยุดกระพริบ แล้วจึงกดปุ่ม "TARA" 1 ครั้ง เพื่อให้
ค่าของเครื่องชั่ง เริ่มที่ "0.000kg"

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3,
ซอยเก้ากิโล 23, ถ.เก้ากิโล, ต.สุรศักดิ์, อ.ศรีราชา,
จ.ชลบุรี 20110, แฟกซ์: 038-314119
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314-118,
038-773-660, 081-633-9942

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านฮอสโปร (Hospro) 2097/1
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
Tel. 02-0075401

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
fanpage: beurethailand

LINE @cservice
line: @beurethai

"บอยเลอร์ เบบีแคร์ ทำให้คุณดูแลลูกน้อยได้ด้วยตัวคุณเอง"