

## เรียนคุณลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกสินค้าของเรา เรามีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการทดสอบอย่างละเอียด อาทิเช่น อุปกรณ์ให้ความอบอุ่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดันเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องนวด อุปกรณ์ด้านความงาม อุปกรณ์สำหรับเด็ก และเครื่องกรองอากาศ โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
ทีมงานบอยเลอร์

- อุปกรณ์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำแนะนำสำหรับการใช้งานด้านล่างเท่านั้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ระมัดระวัง
- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการนวดแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์ ห้ามใช้อุปกรณ์กับ สัตว์เลี้ยง, เด็ก, บริเวณที่มีอาการบาดเจ็บ (เช่น แผลไฟไหม้, แผลเปิด, แผลเป็น), ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์, หลังการผ่าตัด หรือในส่วนที่อ่อนไหวของร่างกาย (เช่น หัว หรือข้อต่อ) หากท่านใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ, รากฟันเทียม เครื่องช่วยหายใจอื่นๆ หรือหากท่านไม่แน่ใจว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้หรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนการใช้งาน
- ควรเก็บถ่านให้พ้นมือเด็ก อาจเกิดอันตรายจากการกลืน หรือการสำลัก
- หากผิวหนังหรือตาของท่านสัมผัสเข้ากับของเหลวในถ่านโดยตรง ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำสะอาดและรีบพบแพทย์
- ควรเปลี่ยนถ่านทั้งสองก้อนพร้อมกันเสมอ
- ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำ
- สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์ร่วมกับขยะในครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ให้ทำลายอุปกรณ์ที่จุดทำลายหรือจุดรีไซเคิลในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ โดยทำการกำจัดอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC – WEEE (อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยะ) หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำจัดของเสียของท่าน
- ท่านควรทิ้งถ่านที่ใช้แล้วในกล่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ หรือที่จุดรีไซเคิล
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ ขาดประสบการณ์ และ/หรือขาดความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลจากผู้ที่สามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้งานได้ หรือได้รับคำแนะนำจากบุคคลที่รู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ควรได้รับการดูแลขณะที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเล่น

## การรับประกัน / บริการ

กรณีมีข้อเรียกร้องภายใต้การรับประกัน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของท่าน หรือตัวแทนในท้องถิ่นที่ระบุในรายการ "บริการระหว่างประเทศ" ในกรณีที่ท่านคืนสินค้า กรุณาแนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเงื่อนไขการรับประกันต่อไปนี้มีผลบังคับใช้:

- 1.ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Beurer คือ 3 ปีหรือ – หากนานกว่านั้น - ตัวแทนจำหน่ายแต่ละประเทศจะระบุระยะเวลาการรับประกันโดยนับจากวันที่ซื้อสินค้าในกรณีที่มีการเรียกร้องการรับประกัน วันที่ทำการซื้อจะต้องถูกตรวจสอบโดยอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้
- 2.การซ่อมแซม (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า หรือชิ้นส่วนของตัวเครื่อง) จะไม่ขยายเวลาการรับประกัน
- 3.การรับประกันจะไม่ผลบังคับใช้สำหรับความเสียหายที่เกิดจาก
  - ก. การรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่ปฏิบัติตามคู่มือ
  - ข. การซ่อมแซมหรือดัดแปลงโดยลูกค้า หรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต
  - ค. การขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือระหว่างการขนส่งไปยังศูนย์บริการ
  - ง. การรับประกันจะไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมที่มีการสึกหรอตามปกติ (ข้อมิอ, แบตเตอรี่ ฯลฯ )
- 4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวเครื่องจะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันก็ตาม

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมคส์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 เขตกีฬา 23 เขตกีฬา อ.ศรีราชา

ชลบุรี 20110 โทรศัพท์: 038-314119

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
fanpage: Beurerthailand



line: @beurerthai



โทร. 038-314118