

เรียน คุณลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้สินค้าจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ชื่อแบรนด์ของเราแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อการนำมาใช้งาน สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ทำความร้อน เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เครื่องวัดชีพจร รวมถึงอุปกรณ์บำบัดอย่างอ่อนโยน อาทิเช่น เครื่องนวด เครื่องฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์ด้านความงามและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กทารก

ขอแสดงความนับถือ
บ่อยครั้งที่

ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์

เด็กทารกต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากเพื่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย นี่คือเหตุผลที่พ่อแม่ต้องหมั่นดูแลน้ำหนักของเด็กทารกอย่างสม่ำเสมอ เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สบายใจได้ว่าเด็กทารกนั้นจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอและมีพัฒนาการที่ดีได้ โดยเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษจาก beurer คุณสามารถติดตามน้ำหนักของลูกน้อย เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะมีพัฒนาการที่สมวัย

ขนาดและเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- เครื่องชั่งน้ำหนักทารก ดีไซน์โค้งมน
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่าย
- ฟังก์ชัน HOLD ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักเด็กทารกขณะเคลื่อนไหวหรือดิ้น มีทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล
- มีดลับเมตรในตัว (150 ซม.)
- ฟังก์ชัน TARE ใช้สำหรับทดค่าน้ำหนักผ้าห่อตัวของเด็กทารกได้
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 20 กิโลกรัม
- ผลลัพธ์การวัดน้ำหนักจะแสดงขึ้นทีละ 5 กรัม (0.01 ปอนด์, 0.18 ออนซ์)
- มีสวิตช์ ปิด แบบอัตโนมัติ
- สามารถเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักได้ 3 แบบ (กก./ปอนด์/ออนซ์)
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 10 ค่า (ล่าสุด)
- ส่งค่าที่วัดได้ไปยังแอปพลิเคชัน “beurer BabyCare” ความไวโหลดฟรี

1. บรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วย

- คู่มือแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ฉบับย่อ
- เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก รุ่น BY90
- ถ่าน AAA 3 ก้อน ขนาด 1.5 โวลต์
- คู่มือแนะนำการใช้งานอุปกรณ์อย่างละเอียด

2. เครื่องหมายและสัญลักษณ์

	<p>คำเตือน</p> <p>สัญลักษณ์คำเตือนที่แสดงถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ</p>
--	--

	<p>สำคัญ</p> <p>คำแนะนำด้านความปลอดภัยเนื่องจากอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์/ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม</p>
	<p>หมายเหตุ</p> <p>โปรดสังเกตรายละเอียด</p>
	<p>กรุณาอ่านคำแนะนำ</p>
	<p>การทำลายอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – WEEE</p>
	<p>บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปรีไซเคิลได้</p>
	<p>ผู้ผลิต</p>
	<p>ฉลากมาตรฐาน CE</p> <p>เครื่องหมาย CE ที่รับรองผลิตภัณฑ์นี้ว่าผ่านคุณสมบัติเครื่องมือการแพทย์ของ Directive</p>
	<p>สัญลักษณ์การรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซียและสมาชิกของ CIS</p>

3. คำเตือนและหมายเหตุด้านความปลอดภัย

- คำเตือน**
- หมายเหตุด้านความปลอดภัย
- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็กเล็ก
 - ควรเก็บแบตเตอรี่และเครื่องชั่งให้พ้นมือเด็กเล็ก การกลืนแบตเตอรี่ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง หากกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ควรนำเด็กไปพบแพทย์ทันที
 - ดูแลไม่ให้เครื่องชั่งน้ำหนักโดนกระแทก ความชื้น ฝุ่นละออง สารเคมี อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และแหล่งความร้อนบริเวณใกล้เคียง (เตาอบ เครื่องทำความร้อน)
 - การซ่อมแซมจะต้องดำเนินการโดยฝ่ายบริการลูกค้าของ beurer หรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

- อย่ากดปุ่มแรง ๆ หรือใช้วัตถุปลายแหลมจิ้ม
- สำคัญ**
- อย่าวางวัตถุใด ๆ บนเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ความแม่นยำของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกอาจลดลงเมื่ออยู่ใกล้แม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (เช่น เตามแม่เหล็กไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ)
- ถอดตัวล็อคการขนส่งออก

หมายเหตุ

- ความสูงสุดของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกคือ 20 กก. (44 ปอนด์, 705 ออนซ์) ผลลัพธ์สำหรับการวัดน้ำหนักจะแสดงขึ้นทีละ 5 กรัม (0.01 ปอนด์, 0.18 ออนซ์)
- ในกรณีได้ผลการวัดที่แตกต่างกัน (ระหว่างมาตราส่วนและแอปพลิเคชัน) ให้ใช้ค่าที่วัดได้บนมาตราส่วนเท่านั้น
- เมื่อจัดส่งให้ลูกค้า เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกจะถูกตั้งค่าเป็น "กก."

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการแบตเตอรี่

หากผิวหนังและดวงตาสัมผัสกับขี้เกลือของเหลวในแบตเตอรี่ ให้รีบล้างบริเวณที่โดนของเหลวด้วยน้ำสะอาดและควรไปพบแพทย์ทันที

- **ระวังอันตรายจากการสำลักสำลัก!** เด็กเล็กอาจกลืนและสำลักแบตเตอรี่ได้ ควรเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากเด็ก ๆ
- สังเกตเครื่องหมายขั้วบวก (+) และลบ (-)
- หากแบตเตอรี่รั่ว ให้ทำความสะอาดช่องใส่แบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้งและสวมถุงมือป้องกัน
- ระวังไม่ให้แบตเตอรี่โดนความร้อนมากเกินไป


เสี่ยงต่อการระเบิด! อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ




- ห้ามทำการลัดวงจรแบตเตอรี่
- หากไม่ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้นำแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่ก่อน
- ใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่ากันเท่านั้น
- ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดพร้อมกันเสมอ
- ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือบดทำลายแบตเตอรี่

4. วัตถุประสงค์การใช้งาน


เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกมีไว้สำหรับวัดน้ำหนักของทารกและเด็กเล็กเท่านั้น เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์หรือทางคลินิก การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกต้องทำตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการออกแบบมาและในลักษณะที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบใดก็ตามอาจเป็นอันตรายได้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

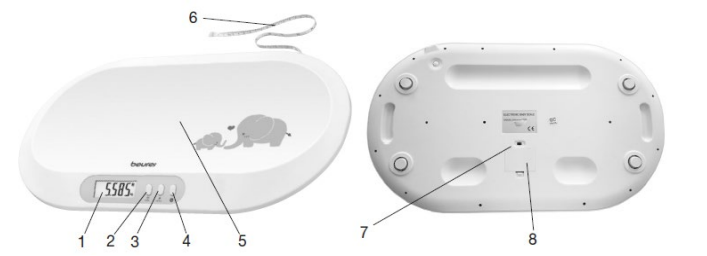5. คำอธิบายอุปกรณ์

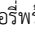

1.จอแสดงผล	5.พื้นผิวของเครื่องชั่งน้ำหนัก
2. ปุ่มเปิด/ปิด/ชั่งภาชนะ(TARE) 	6.สายวัดแบบดึงออกและเก็บได้
3. ปุ่ม HOLD ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักเด็กทารกขณะเคลื่อนไหวหรือตื่น 	7.ตัวเปลี่ยนหน่วย (กก./ปอนด์/ออนซ์)
4. ปุ่ม Bluetooth® 	8.ช่องใส่แบตเตอรี่พร้อมฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่

หน้าจอบ่งชี้ผล

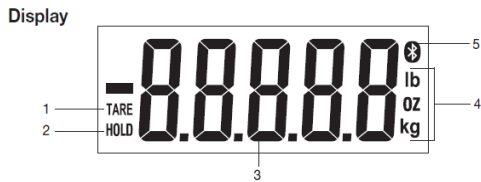

1."TARE" (ใช้งานฟังก์ชัน TARE)	4. หน่วยน้ำหนัก (กก./ออนซ์/ปอนด์)
2."HOLD" (ใช้งานฟังก์ชัน HOLD)	5.สัญลักษณ์ Bluetooth® (เปิดใช้งาน Bluetooth®)
3. จอแสดงผลผลลัพธ์ของน้ำหนัก	

การเลือกหน่วยน้ำหนัก

เมื่อจัดส่งให้กับลูกค้า เครื่องชั่งจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็น กิโลกรัม "kg" คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักได้ที่ด้านหลังของเครื่องชั่ง โดยเปลี่ยนเป็นปอนด์ "lb" หรือออนซ์ "oz"



6.การใช้งานเบื้องต้น

การใส่แบตเตอรี่

ก่อนใช้เครื่องชั่งเด็กทารก คุณต้องใส่แบตเตอรี่ขนาด 1.5V. x AAA จำนวน 3 ก้อน ในช่องใส่แบตเตอรี่ของเครื่องชั่งก่อน มีวิธีการ ดังนี้

- 1.เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านล่างของเครื่องชั่ง
- 2.ใส่แบตเตอรี่ขนาด 1.5V. x AAA จำนวน 3 ก้อน ในช่องใส่แบตเตอรี่



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกด้าน (+ / -)

- 3.ปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่จนกว่าจะได้ยินและรู้สึกว่ามีน๊อตล็อกเข้าที่



บันทึก

ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อ "Lo" ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

การใช้งานครั้งแรกด้วยแอป

คุณสามารถถ่ายโอนค่าน้ำหนักที่วัดได้ไปยังสมาร์ตโฟนของคุณผ่าน Bluetooth® ด้วยแอป "beurer BabyCare" ดาวนโหลดฟรี

วางสมาร์ตโฟนไว้ใกล้กับเครื่องชั่งเพื่อรักษาการเชื่อมต่อ Bluetooth® ระหว่างการใช้งานครั้งแรก

ในการเชื่อมต่อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกกับสมาร์ตโฟน ให้ดำเนินการดังนี้:

- 1.เปิดใช้งาน Bluetooth® ในการตั้งค่าสมาร์ตโฟนของคุณ



หมายเหตุ: อุปกรณ์ Bluetooth® เช่น มาตรฐาน อาจไม่สามารถมองเห็นได้ในการตั้งค่าทั่วไปของรายการอุปกรณ์ Bluetooth®

- 2.ดาวนโหลดแอป "beurer BabyCare" ได้ฟรี จาก Apple App Store (iOS) หรือจาก Google Play (Android™)

- 3.เริ่มแอป "beurer BabyCare" และทำตามคำแนะนำ

- 4.ป้อนข้อมูลผู้ใช้

ต้องตั้งค่าหรือป้อนการตั้งค่าดังต่อไปนี้ในแอป "beurer BabyCare"


User data	Set values
Date of birth	DAY, MONTH, YEAR

- 5.ใส่แบตเตอรี่และวางเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกบนพื้นที่เรียบและแข็งแรง

- 6.รอรเวลา 120 วินาที(2นาที) เครื่องชั่งทารกจะแสดง "APP" บนหน้าจอบและจะสามารถเชื่อมต่อกับแอป "beurer BabyCare" ได้



หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกกับแอปในระหว่างการใช้งานครั้งแรก "APP" จะกะพริบเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อเปิดเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกอีกครั้ง ตัวบ่งชี้จะไม่แสดงอีกต่อไป หากเชื่อมต่อกับแอปสำเร็จ


- 7.เมื่อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกเชื่อมต่อกับแอปสำเร็จแล้ว สัญลักษณ์ Bluetooth®  ปรากฏในจอแสดงผล

- 8.วางทารกลงบนเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก ควรทำอย่างระมัดระวัง ระวังศีรษะของเด็กทารกและอย่าปล่อยให้ทารกดิ้นตกพื้น


- 9.เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกนี้มีฟังก์ชัน 'HOLD' (แบบอัตโนมัติถือและแมนนวล) ฟังก์ชัน AUTO HOLD (เปิดใช้งานเป็นมาตรฐาน) จะกำหนดน้ำหนักของทารกบนจอแสดงผลทันทีที่น้ำหนักยังคงเพียงพอที่จะได้ค่าวัดที่แน่นอน หากทารกเคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็ว น้ำหนักของทารกจะไม่สามารถถูกบันทึกได้ ดังนั้น พยายามทำให้ทารกที่ตื่นอยู่ สงบลง เพื่อให้ได้ค่าการวัดที่รวดเร็ว อย่าสัมผัสเด็กทารกขณะอยู่บนเครื่องชั่ง เพราะจะส่งผลต่อการวัดน้ำหนักเมื่อน้ำหนักของทารกแสดงขึ้นบนจอแสดงผล คำว่า 'HOLD' จะหยุดกะพริบและน้ำหนักจะแสดงเป็นเวลา 120 วินาที(2 นาที)



หมายเหตุ: หากไม่สามารถระบุน้ำหนักอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 8 วินาทีได้ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกจะเฉลี่ยน้ำหนักของทารกเมื่อผ่านไป 4 วินาที (การแสดงผลน้ำหนักจะเป็นแบบกะพริบบนหน้าจอบ่งชี้ผล)

- 10.น้ำหนักของทารกจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกและจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 120 วินาที(2นาที) หากต้องการปิดเครื่องชั่งด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม ON/OFF/TARE  ค้างไว้ 3 วินาที

- 11.หากทารกดิ้นแรงเกินไป คุณสามารถเลือกฟังก์ชัน MECHANICAL HOLD ได้โดยการกดปุ่ม HOLD หลังจากผ่านไป 5 วินาที คำว่า 'HOLD' จะหยุดกะพริบและน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กทารกจะแสดงเป็นเวลา 120 วินาที(2 นาที)

- 12.หลังจากทำการชั่งน้ำหนักเด็กทารกเรียบร้อยแล้วหากต้องบันทึกน้ำหนักของเด็กทารกที่วัดได้ไปยังแอป ให้เปิดแอปแล้วกดปุ่ม Bluetooth® 

- 13.เครื่องชั่งจะทำการปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์


การใช้งานครั้งแรกโดยไม่ใช้แอป

เราขอแนะนำให้ใช้แอป "beurer BabyCare" สำหรับการใช้งานครั้งแรกและดำเนินการตั้งค่างทั้งหมด (ดูหัวข้อ"การใช้งานครั้งแรกด้วยแอป")





หมายเหตุ: การวัดค่าน้ำหนักทารกที่บ้านที่ไว้ในเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกโดยไม่ได้อเชื่อมต่อกับแอปก่อนจะวัดค่า จะไม่สามารถถ่ายโอนได้

- 1.วางเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรง พื้นผิวที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวัดค่าที่ถูกต้อง

- 2.กดปุ่ม ON/OFF/TARE  เพื่อเปิดเครื่องชั่งทารก "APP" กะพริบบนหน้าจอบเป็นเวลา 120 วินาที (2นาที) กดปุ่มใดก็ได้เพื่อใช้เครื่องชั่งเด็กทารกโดยไม่ต้องใช้แอป

- 3.ทันทีที่ "0.000 kg" ปรากฏบนจอแสดงผล เครื่องชั่งถึงจะพร้อมทำงาน

- 4.วางทารกลงบนเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก ควรกระทำอย่างระมัดระวัง ระวังศีรษะของทารกและอย่าปล่อยให้ทารกดิ้นตกพื้น

- 5.น้ำหนักจะแสดงเป็นเวลา 120 วินาที(2นาที) จากนั้นเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม ON/OFF/TARE  เพื่อทำการวัดอีกครั้ง หากต้องการปิดเครื่องชั่งด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม ON/OFF/TARE  ค้างไว้ 3 วินาที


การชั่งกับแอปในภายหลัง

หากคุณยังไม่ได้ซิงค์เครื่องชั่งทารกกับแอป "beurer BabyCare" ระหว่างการใช้งานครั้งแรก คุณสามารถทำได้ในภายหลัง

- 1.กดปุ่ม ON/OFF/TARE  เพื่อเปิดเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก

2. APP จะกะพริบบนจอแสดงผลของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกเป็นเวลา 10 วินาที หากแอปเบออยู่ สามารถเชื่อมต่อเครื่องชั่งน้ำหนักทารกได้ในเวลา 10 วินาที



อีกวิธีหนึ่ง:

กดปุ่ม Bluetooth®  ขณะที่เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกกำลังทำงาน หากแอปเปิดอยู่ สามารถเชื่อมต่อเครื่องชั่งทารกได้ 120 วินาที(2นาที)

- 3.เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกจะเชื่อมต่อกับแอปสำเร็จเมื่อสัญลักษณ์ Bluetooth® สว่างขึ้นอย่างต่อเนื่องบนจอแสดงผล

การโอนการวัด

สามารถบันทึกการวัดได้สูงสุด 10 รายการ

- กดปุ่ม Bluetooth®  ไฟบนหน้าจอบจะเริ่มกะพริบ (120 วินาที) จนกว่าแอปจะเปิดขึ้น สัญลักษณ์ Bluetooth®  จะแสดงอย่างต่อเนื่องบนจอแสดงผล เมื่อมีการเชื่อมต่อสำเร็จจนกระทั่งข้อมูลถูกถ่ายโอนแล้ว หลังจากถ่ายโอนการวัดค่าสำเร็จ เครื่องชั่งน้ำหนัก

เด็กทารกจะปิดเองโดยอัตโนมัติ


การปิดใช้งานฟังก์ชัน AUTO HOLD



หากคุณต้องการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักทารกโดยไม่มีฟังก์ชัน AUTO HOLD คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชัน AUTO HOLD ได้


- 1.เมื่อ "0.000 kg" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอบ ฟังก์ชัน AUTO HOLD สามารถเปิดใช้งานได้โดยกดปุ่ม HOLD เป็นเวลา 3 วินาที

- 2.ทันทีที่ "0.000 kg" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอบ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกพร้อมที่จะทำการวัดทันที

- 3.วางทารกลงบนเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก ควรกระทำอย่างระมัดระวัง ระวังศีรษะของทารกและอย่าปล่อยให้ทารกดิ้นตกพื้น

- 4.หากต้องการชั่งน้ำหนักทารกแล้ว ให้กดปุ่ม HOLD สัญลักษณ์ HOLD กะพริบเป็นเวลา 5 วินาที  เมื่อน้ำหนักจะได้รับการยืนยันในหน้าจอบ่งชี้ผล

5. น้ำหนักจะแสดงเป็นเวลา 120 วินาที(2นาท) จากนั้นจะปิดโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม ON/OFF/TARE  เพื่อทำการวัดอีกครั้ง หากต้องการปิดเครื่องซึ่งทารกด้วยตนเอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด/ซิงก์ชั่ง  ค้างไว้ 3 วินาที

6. หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชัน AUTO HOLD อีกครั้ง ให้กดปุ่ม HOLD ค้างไว้ 3 วินาที  หมายเหตุ: หากสัญลักษณ์ HOLD + ON ปรากฏในจอแสดงผล ฟังก์ชัน AUTO HOLD จะถูกเปิดใช้งาน

ฟังก์ชัน TARE
หากคุณไม่ต้องการวางทารกลงบนเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกโดยตรง คุณสามารถวางทารกลงบนผ้าเช็ดมือแทนได้ ตัวอย่าง เช่น คุณต้องวางผ้าเช็ดมือไว้บนเครื่องชั่งก่อนที่จะเปิดเครื่อง หากคุณวางผ้าขนหนูหรือวัตถุอื่นๆ ไว้บนเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกเมื่อนั้นเครื่องจะพร้อมทำงานแล้ว และคุณต้องนำวัตถุเหล่านั้นออกอีกครั้งก่อนชั่งน้ำหนักเด็กทารก คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TARE ได้ เมื่อคุณกดปุ่ม TARE แล้ว "TARE" จะแสดงบนจอแสดงผล หากต้องการรีเซ็ตเครื่องชั่งทารกเป็น คุณต้องถอดผ้าขนหนูออกจากเด็กทารก หรือวางผ้าขนหนูลงบนเครื่องชั่งทารก "0.000 kg" E อีกครั้ง


การใช้สายวัด
เมื่อคุณต้องการวัดสัดส่วนของเด็กทารก ให้ดึงสายวัดที่ด้านบนของเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกออก ในการม้วนสายวัดกลับเข้าไปในเครื่องชั่ง ให้กดปุ่มกลมที่อยู่ติดกับสายวัดที่ด้านล่างของเครื่องชั่ง คุณสามารถป้อนส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะของทารกได้ด้วยตนเองในแอป "beurer BabyCare"




7.การใช้งาน
การบันทึกค่าที่วัดได้ในเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกและการถ่ายโอนไปยังแอป
บันทึกการวัดได้สูงสุด 10 ค่า ในเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก ค่าที่บันทึกไว้จะถูกโอนไปยังแอปโดยอัตโนมัติ หากคุณเปิด Bluetooth® ในแอปและเปิด Bluetooth® บนเครื่องชั่ง เมื่อปิดเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกจะไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยอัตโนมัติได้

การลบข้อมูลการวัด
หากต้องการลบการวัดทั้งหมดบนเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก ให้กดปุ่ม Bluetooth®  ค้างไว้ 5 วินาที

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
เมื่อเครื่องชั่งของคุณมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ หากคุณใช้งานเครื่องชั่งด้วยแบตเตอรี่แบบแบบ "Lo" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอและเครื่องชั่งจะปิดเองโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด1.5V x AAA จำนวน3ก้อน การวัดค่าที่บันทึกไว้ทั้งหมดยังคงถูกบันทึกไว้อยู่

-  บันทึก:
- คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องชั่งกับแอปอีกครั้ง (ดูหัวข้อ "การใช้งานครั้งแรกกับแอป") หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใช้แบตเตอรี่ ประเภท ยี่ห้อ และความจุเดียวกันทั้งหมด
- ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
- ใช้แบตเตอรี่ที่ปราศจากโลหะหนัก

- 8. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา**
- ความแม่นยำของกรวัดค่าและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างระมัดระวัง:
 - ควรทำความสะอาดเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกเป็นครั้งคราว
 - ควรทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ และใช้ผงดักฟอกจำนวนเล็กน้อย

-  **สำคัญ**
- อย่าใช้สารทำลายหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่รุนแรง!
 - ห้ามจุ่มเครื่องชั่งน้ำหนักทารกลงในน้ำ
 - ห้ามล้างเครื่องชั่งน้ำหนักทารกผ่านน้ำโดยตรง
 - ห้ามทำความสะอาดเครื่องชั่งน้ำหนักทารกในเครื่องล้างจาน

พื้นที่จัดเก็บ
หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้เครื่องชั่งทารกเป็นระยะเวลาานาน เราขอแนะนำให้คุณเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ระหว่างการจัดเก็บ ห้ามวางวัตถุใด ๆ บนเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก เก็บเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกให้ห่างจากเด็ก ๆ และสัตว์เลี้ยง ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก

9.จะทำไมอย่างใดเมื่อเครื่องเกิดปัญหา?

จอแสดงผล	สาเหตุ	แก้ไข
Err	1.พื้นผิวไม่เรียบและไม่แข็งแรง 2.น้ำหนักเกินความจุสูงสุด 20 กก.	1.วางเครื่องชั่งบนพื้นผิวเรียบและแข็งแรงโดยไม่มีพรมแล้วชั่งทารกอีกครั้ง 2.น้ำหนักของเด็กทารกไม่ควรเกิน 20 กก.
การแสดงค่าน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง	พื้นผิวไม่เรียบและไม่แข็งแรง	วางเครื่องชั่งบนพื้นผิวเรียบและแข็งแรงโดยไม่มีพรมแล้วชั่งทารกอีกครั้ง
การแสดงค่าน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง	เด็กทารกดิ้นมากเกินไป	พยายามทำให้เด็กทารกสงบลง
การแสดงค่าน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง	จุดศูนย์ถ่วงกลางไม่ถูกต้อง	ปิดและเปิดเครื่องชั่งอีกครั้ง รอจนกระทั่งเครื่องชั่งแสดง "0.000 kg" และทำการวัดซ้ำ
ไม่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth®  สัญลักษณ์หายไป).	อุปกรณ์อยู่นอกระยะเชื่อมต่อ	ระยะเชื่อมต่อในที่โล่งประมาณ 15 เมตร, มั่นคงและเต้านสดระยะ, คลื่นวิทยุอื่นๆ อาจรบกวนการส่งสัญญาณ ดังนั้น อย่าวางเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกใกล้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เราเตอร์ WiFi ไมโครเวฟ และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
	โหมด Bluetooth® ปิดอยู่	กดปุ่ม Bluetooth®  จนกระทั่ง 

		สว่างขึ้นในจอแสดงผล
	ไม่มีการเชื่อมต่อกับแอป	ปิด Bluetooth® แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ปิดสมาร์ตโฟนแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นเวลาสั้นๆ แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ ดูคำถามที่พบบ่อยที่ www.beurer.com
Lo	แบตเตอรี่ในเครื่องชั่งหมด	เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก
APP	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกที่ไม่ได้รับการเชื่อมต่อกับแอป การวัดทั้งหมดที่ถูกบันทึกก่อนการซิงโครไนซ์เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกกับแอปไม่สามารถถ่ายโอนได้	เชื่อมต่อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกเข้ากับแอป (ดูหัวข้อ "การใช้งานครั้งแรกกับแอป")

10.การกำจัด
ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์ร่วมกับขยะในครัวเรือน เมื่อหมดอายุการใช้งาน กำจัดอุปกรณ์ที่จัดรวบรวมหรือรีไซเคิลในท้องถิ่นที่เหมาะสมในประเทศของคุณ



ทิ้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC – WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบการกำจัดขยะ


การกำจัดแบตเตอรี่
ต้องทิ้งแบตเตอรี่ทั้งหมดและแบนสนิทในกล่องที่กำหนดไว้ นำไปทิ้งที่จุดรีไซเคิลหรือร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามคุณต้องกำจัดแบตเตอรี่ตามกฎหมายรหัสด้านล่างที่พิมพ์บนแบตเตอรี่ที่มีสารอันตราย:

- Pb = แบตเตอรี่มีสารตะกั่ว
- Cd = แบตเตอรี่มีสารแคดเมียม
- Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท



11. ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	BY90
ขนาด	560 x 330 x 47.5 มม
น้ำหนัก	1.35 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)
แบตเตอรี่ขนาด	1.5V. x AAA 3 ก้อน

ช่วงการวัด	0.050 กก. - 20 กก. (0.11 ปอนด์ - 44 ปอนด์, 1.76 ออนซ์ - 705 ออนซ์)
หน่วยความจำการวัด	10 การวัด
การถ่ายโอนข้อมูลผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth(R)	ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Bluetooth® พลังงานต่ำ ย่านความถี่ 2,400 GHz - 2,480 GHz กำลังส่งสูงสุด 8.0 เดซิเบล เข้ากันได้กับสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ต Bluetooth® ≥ 4.0
ข้อกำหนดของระบบสำหรับแอป “beurer BabyCare”	iOS จากเวอร์ชัน 9.0, Android™ จากเวอร์ชัน 5.0 พร้อม Bluetooth® ≥ 4.0
รายชื่อสมาร์ตโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์สามารถดูได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: connect.beurer.com	

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

เราขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ European RED Directive 2014/53/EU

ประกาศความสอดคล้อง CE สำหรับผลิตภัณฑ์นี้สามารถดูได้ที่:

<https://www.beurer.com/web/de/andingpages/cedeclarationofconformity.php>

12. การรับประกัน/การบริการหลังการขาย

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (ต่อไปนี้จะเรียกว่า

“Beurer”) ให้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างและในขอบเขตที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับประกันด้านล่างจะไม่กระทบต่อภาระหน้าที่ในการรับประกันตามกฎหมาย

ของผู้ขายซึ่งมีผลมาจากข้อตกลงการขายกับผู้ซื้อ การรับประกันจะใช้โดยไม่มี

กระทบกระเทือนต่อบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับความรับผิด

Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์นี้

ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 5 ปี นับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานจาก

ผู้ขาย

การรับประกันใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคและใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ส่วนบุคคลโดยเฉพาะในบริบทของการใช้งานภายในประเทศ

ให้ใช้กฎหมายเยอรมัน

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องใน

การใช้งานตามข้อกำหนดต่อไปนี้ Beurer จะดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดส่งเปลี่ยนเพื่อ

ทดแทนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้

หากผู้ซื้อต้องการเรียกร้องการรับประกัน พวกเขาควรติดต่อร้านค้าปลีกในพื้นที่ของตน

เป็นกรณีแรก: ดูรายชื่อที่อยู่บริการ "บริการระหว่างประเทศ" ที่แนบมา

จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกร้องการรับประกัน เช่น

สามารถส่งสินค้าได้ทีไหนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง การเรียกร้องการรับประกันจะได้รับ

การพิจารณาถัดเมื่อผู้ซื้อสามารถมองหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก Beurer ใช้ร่วมกับ

- สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน และ ผลิตภัณฑ์เดิม

ข้อความต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นจากการรับประกัน:

- การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติ

- อุปกรณ์เสริมที่ให้กับผลิตภัณฑ์นี้เสื่อมสภาพหรือใช้หมดไปแล้วจากการใช้งานที่เหมาะสม (เช่น แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ผ้าพันแขน ซิล อีเล็กโทรด หล่อกำเนิดแสง อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เสริมของเครื่องพญา)

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะดวก จัดเก็บ หรือบำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ

ข้อกำหนดของคำแนะนำในการใช้งาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เปิด ซ่อมแซม หรือดัดแปลงโดยผู้

ซื้อหรือโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Beurer

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า หรือระหว่างศูนย์บริการกับลูกค้า

- ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเป็นของเก่าหรือเป็นสินค้าใช้แล้ว

- ความเสียหายที่ตามมาซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในผลิตภัณฑ์นี้ (อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้

การเรียกร้องอาจเกิดขึ้นจากความรับผิดในผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดความรับผิดตาม

กฎหมายภาคบังคับอื่นๆ)

การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันไม่ว่ากรณีใดๆ

บริษัท เบลเมกลไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 065-503-6565