




## เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน

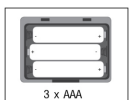

1. พลิกด้านหลังเครื่องเพื่อใส่ถ่าน AAA จำนวน 3 ก้อน และทำการปิดฝาครอบถ่านให้เรียบร้อย

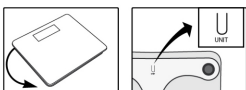

2. เลือกหน่วยการวัดให้เป็นกิโลกรัม ปอนด์หรือสโตน โดยการกดปุ่ม Unit ที่ด้านหลังเครื่อง

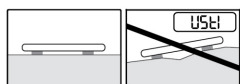

3. วางเครื่องชั่งน้ำหนักบนพื้นราบและแข็ง ไม่แนะนำให้วางบนพื้นลามิเนต หรือ พรม

## การแจ้งเตือนต่างๆ



สัญลักษณ์เตือนน้ำหนักมากเกินไปที่เครื่องรับ



แบตเตอรี่อ่อนให้ตรวจสอบแบตเตอรี่


# beurer

## คู่มือการใช้งาน GS235 GLASS BATHROOM SCALE



หน้าจอแสดงผล แสดงตัวเลขดิจิทัลมีไฟ ขนาดใหญ่

## เริ่มต้นการใช้งาน

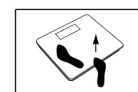


1. ก้าวขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนัก

\* สำหรับการใช้งานครั้งแรกหรือเมื่อมีการย้ายตำแหน่งให้ชั่งน้ำหนัก ประมาณ 5 ครั้งเพื่อเป็นการ calibrate



2. ยืนนิ่งๆบนชั่งน้ำหนัก

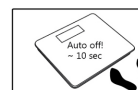

3. เครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติหลังการใช้งาน 10 วินาที

**BEURER** ผลิตกันที่คุณภาพชั้นนำ จากประเทศเยอรมนี  
“ผลิตกันที่ขั้นเลิศ พร้อมการบริการที่ดีเยี่ยม”

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมทไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก่ากิโล 23 ถ.เก่ากิโล ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777

