

เครื่องชั่ง BF400

ทำให้การชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์สภาพร่างกาย เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ



เริ่มใส่แบตเตอรี่ พลิกด้านหลังเครื่องซึ่งจะมีช่องใส่ถ่าน ใส่ตามลำดับดังรูปแล้วปิดให้เรียบร้อย



หากหน้าจอยังดับอยู่ให้ใช้เท้า กดที่แท่นวางเท้าของเครื่องซึ่ง เพื่อให้หน้าจอสว่างขึ้น



วางเครื่องชั่งในพื้นที่ที่มีความแข็ง ถ้าวางบนพรม หรือ วางบนสังกะสี จะทำให้ค่าที่อ่านผิดพลาดได้นะคะ



เปลี่ยนหน่วยวัดน้ำหนัก ด้วยการกดปุ่มด้านหลัง

ขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่ง ได้เลยคะ

รอจนกว่าตัวเลขหยุดนิ่ง แล้วจึงอ่านค่าน้ำหนักนะคะ



*วิธีการชั่งต้องให้ส้นเท้า อยู่ที่ด้านล่างสุดของแถบโลหะ อิเล็กโทรด (เป็นจุดเริ่มต้น) "ตำแหน่ง ลูกศร 1 และ 2 ชี้อยู่" เพราะผิวหน้าของเครื่องชั่งมีลักษณะโค้ง ถ้ายืนไม่เหมือนเดิมจะทำให้ น้ำหนักที่กดลงแตกต่างจากเดิม ส่งผลให้เครื่องชั่งแสดงค่าผิดพลาดได้



เริ่มการวิเคราะห์สภาพร่างกาย


หน้าจอจะแสดงหน่วย ความจำของผู้ใช้งาน P-01 ถึง P-10

เพิ่มตำแหน่งหน่วยความจำให้กดปุ่ม \wedge อยู่ด้านขวาของปุ่ม set และลดตำแหน่งให้กดปุ่ม \vee อยู่ด้านซ้ายของปุ่ม set



กดปุ่ม set ที่อยู่ด้านบน เครื่องชั่ง

ตั้งค่าผู้ใช้ก่อนนะคะ

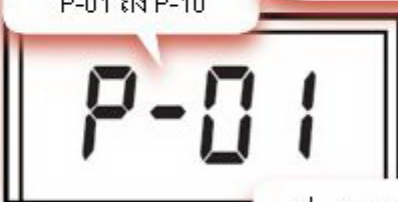

ยอมรับค่า ที่เลือกให้ กดปุ่ม set



หน้าจอ แสดง ส่วนสูง

เพิ่มค่าให้กดปุ่ม \wedge และลดค่ากดปุ่ม \vee


ยอมรับค่าที่เลือก ให้กดปุ่ม set



หน้าจอจะ แสดง อายุ



ยอมรับค่า ที่เลือกให้ กดปุ่ม set

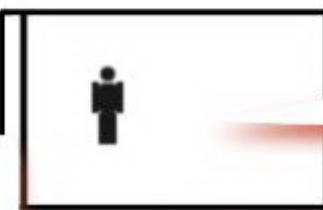

หน้าจอจะ แสดง เพศ

เพศชาย



เพศหญิง



ยอมรับค่า ที่เลือกให้ กดปุ่ม set

เพิ่มค่าให้กดปุ่ม \wedge และลดค่ากดปุ่ม \vee

เปลี่ยนค่าให้กดปุ่ม \wedge หรือกดปุ่ม \vee



หน้าจอจะแสดง
ระดับความล้าเมอ
ในการออกกำลังกาย

A-1 ไม่มีการออกกำลังกาย

A-2 ระดับต่ำ เช่น เดินเล่นในสวน การบิดตัวเล็กน้อย

A-3 ระดับปานกลาง เช่น ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที 2-4 ครั้งต่อสัปดาห์

A-4 ระดับสูง เช่น ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์

A-5 ระดับสูงมาก เช่น ออกกำลังกายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ทุกวัน



เพิ่มค่าให้กดปุ่ม
และลดค่ากดปุ่ม

ยอมรับค่าที่เลือก
ให้กดปุ่ม set



หน้าจอ
แสดง
0.0 kg




*วิธีการยืนต้องให้ส้นเท้า อยู่ที่ด้านล่างสุดของแถบโลหะ อิเล็กโตรด (เป็นจุดเริ่มต้น) "ตำแหน่ง ลูกศร 1 และ 2 ซ้ำอยู่" เพราะผิวหน้าของเครื่องซึ่งมีลักษณะโค้ง ถ้ายืนไม่เหมือนเดิมจะทำให้ น้ำหนักที่ตกลงแตกต่างจากเดิม ส่งผลให้เครื่องซึ่งแสดงค่าผิดเพี้ยนได้

ขึ้นไปยืนบนเครื่องซึ่ง
โดยให้เท้าสัมผัสแถบโลหะ
ทั้ง 4 แถบ ยืนนิ่งๆ นะคะ




หน้าจอ แสดง
น้ำหนักที่วัดได้
ยื่นต่อไปอีกสัก
ครู่ นะคะ

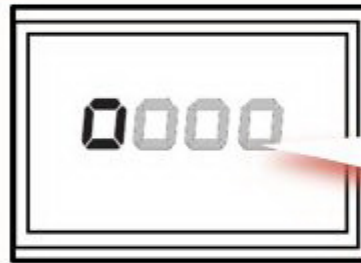

หน้าจอค่าตั้ง
ประมวลผล
รอสักครู่ นะคะ

ไม่ควรใส่ถุงเท้า
เนื่องจากแถบโลหะ
ต้องการสัมผัสกับ
ฝ่าเท้าโดยตรง

หน้าจอ แสดง
เปอร์เซ็นต์ไขมัน
ในร่างกายที่วัดได้
ยืนนิ่งๆ ต่อไปก่อนนะ

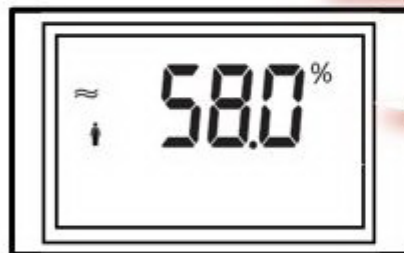


หน้าจอ แสดงเปอร์เซ็นต์น้ำ
ในร่างกายที่วัดได้
ยืนนิ่งๆ ต่อไปอีกนะ

หน้าจอ แสดงเปอร์เซ็นต์
กล้ามเนื้อในร่างกายที่วัดได้
ยืนนิ่งๆ ต่อไปก่อนนะ



หน้าจอแสดงน้ำหนักที่วัดได้
อีกครั้ง แสดงว่า ทำการวัดเสร็จ
เรียบร้อยแล้วนะ
ลงจากเครื่องซึ่งได้แล้วนะ

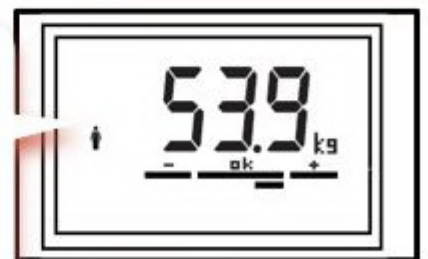

ผู้นำเข้า: บริษัท เมลเมกส์ไทย จำกัด
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร: 038-314-118,
038-773-660, 081-633-9942



สำนักงานกรุงเทพฯ : อาคารเซ็นทรัลเวสต์ ชั้น 29
เลขที่ 99/9 ถนนพระราม1 แขวงเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-207-2308