

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของเราถูกทดลองแล้วเพื่อการใช้ที่เกี่ยวกับ ความอบอุ่น, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, อุณหภูมิของร่างกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนูนมวล, ความสวยงาม, การรูด และ อากาศ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยและเก็บไว้เพื่อการใช้ต่อไป และโปรดเก็บคู่มือไว้ในกรณีที่มีผู้อื่นจะหยิบมาอ่านได้ง่าย

ขอแสดงความนับถือ
beurer

เครื่องหมายและสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะมีปรากฏบนอุปกรณ์ บนบรรจุภัณฑ์และบนคู่มือ ในการแนะนำสำหรับการใช้งานนี้บนบรรจุภัณฑ์และบนแผ่นประเภทของอุปกรณ์:


	กรุณาอ่านคำแนะนำ		ซึกด้วยอุณหภูมิปกติไม่เกิน 30°C ในระดับอุณหภูมิปกติเป็นพิเศษ
	ห้ามใช้เข็มหมุดกับอุปกรณ์		ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
	ห้ามพับหรือขยำ!		ห้ามปั่นแห้งหรืออบ
	ห้ามสูบบุหรี่!		ห้ามรีด
	ไม่ควรใช้กับเด็กเล็ก (อายุ 0-3 ปี)		ส่วนที่เป็นสิ่งทอของอุปกรณ์ เป็นไปตามข้อกำหนดที่เคร่งครัดในเชิงระบบนิเวศมนุษย์ตามมาตรฐานของ Oeko-Tex 100 ได้รับการตรวจสอบโดยสถาบันวิจัย Hohenstein
	โปรดทิ้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)		ทิ้งบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	ผู้ผลิต		
	การติดฉลาก CE ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของคำสั่งของยุโรปและประเทศที่เกี่ยวข้อง		
	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับทางเทคนิคของ EAEU		
	ผลิตภัณฑ์มีการป้องกันระดับ II อุปกรณ์นี้มีฉนวนป้องกันสองชั้นดังนั้นจึงเป็นไปตามระดับการป้องกัน 2		
	คำเตือน: คำเตือนเรื่องความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความอันตรายต่อสุขภาพ		
	ข้อควรระวัง: ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์เสริม		
	หมายเหตุ: ข้อมูลสำคัญ		

1. ภายในบรรจุภัณฑ์

- 1 แผ่นให้ความอบอุ่น
- 1 ตัวควบคุมอุณหภูมิ
- 1 คู่มือการใช้งาน

1.1 คำอธิบายตัวอุปกรณ์

1. ปลั๊กไฟหลัก
2. สายไฟหลัก
3. ตัวควบคุมอุณหภูมิ
4. จอแสดงผลแบบเรืองแสงสำหรับการตั้งค่าอุณหภูมิ
5. สวิตช์แบบเลื่อนสำหรับเปิด/ปิด และตั้งค่าอุณหภูมิ
6. ข้อต่อสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นให้ความอบอุ่น

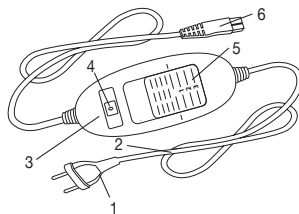

2. คำแนะนำสำคัญในการใช้งานอุปกรณ์

⚠ คำเตือน

- การไม่ปฏิบัติตามหมายเหตุต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือวัสดุเสียหาย (ไฟฟ้าช็อตผิวหนังไหม้ไฟไหม้) ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอันตรายต่อไปนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องสุขภาพของคุณและผู้อื่นเท่านั้น แต่ช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์อีกด้วย ด้วยเหตุนี้โปรดใส่ใจกับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้ และเมื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น โปรดมอบให้พร้อมกับคำแนะนำที่แนบมาด้วย
- ห้ามใช้แผ่นความร้อนนี้โดยผู้ที่ไม่ไวต่อความร้อนหรือผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนได้ (เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย ผู้ที่มีผิวหนังเป็นแผลเป็นในบริเวณที่จะทาแผ่น หรือ หลังจากการประทุพพาทหรือการปวดหรือแอลกอฮอล์)
- เด็กเล็ก (อายุ 0-3 ปี) ไม่สามารถใช้แผ่นความร้อนนี้ เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนสูงเกินไปได้
- เด็กเล็ก (อายุ 3-8 ปี) ไม่สามารถใช้แผ่นความร้อนนี้ได้เว้นแต่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ตั้งค่าตัวควบคุม และเด็กที่ใช้จะต้องได้รับคำแนะนำอย่างเพียงพอเกี่ยวกับวิธีใช้แผ่นความร้อนอย่างปลอดภัย
- เด็กที่อายุมากกว่า 8 ปี ผู้ที่ด้อยทักษะทางร่างกาย ขาดทักษะทางประสาทสัมผัส หรือ สภาวะทางจิตบกพร่อง และ ผู้ที่ขาดประสบการณ์ หรือ ความรู้ อาจใช้แผ่นความร้อนนี้ได้หากพวกเขาได้รับการดูแล และ ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้แผ่นความร้อนอย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถตระหนักได้ถึงความเสี่ยงที่ตามมาจากการใช้งาน
- ห้ามไม่ให้เด็กเล่นแผ่นให้ความอบอุ่น
- ห้ามไม่ให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาด และ บำรุงรักษาอุปกรณ์เว้นแต่จะได้รับดูแลอย่างใกล้ชิด
- แผ่นให้ความอบอุ่นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงพยาบาล
- ห้ามใช้เข็มกลัดกับแผ่นให้ความอบอุ่น
- ห้ามใช้งานเมื่อตัวแผ่นให้ความอบอุ่นถูกพับ หรือ มัดอยู่
- ห้ามใช้งานแผ่นให้ความอบอุ่นขณะที่เปียกอยู่
- แผ่นให้ความอบอุ่นต้องใช้ร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิที่ระบุไว้บนฉลากเท่านั้น
- สนามไฟฟ้า และ สนามแม่เหล็กที่ปล่อยออกมาจากแผ่นให้ความอบอุ่นอาจรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ อย่างไรก็ตามขอบเขตของสนามไฟฟ้า และ สนามแม่เหล็กที่ปล่อยออกมาจะอยู่ในช่วงที่เหมาะสม โดย
ความแรงของสนามไฟฟ้า: สูงสุด 5000 V / m
ความแรงของสนามแม่เหล็ก: สูงสุด 80 A / m

ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก: สูงสุด 0.1 millitesla

โปรดปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณก่อนใช้งานแผ่นให้ความอบอุ่นนี้

- ห้าม ตึง บิด หรือออสายเคเบิล
- โปรดตรวจสอบแผ่นให้ความอบอุ่นบ่อย ๆ เพื่อตรวจสอบรอยการสึกหรอ หรือ ความเสียหาย หากมีอาการดังกล่าวปรากฏให้เห็น หรือ หากมีการใช้แผ่นให้ความอบอุ่นไม่ถูกต้อง รวมถึงหากแผ่นให้ความอบอุ่นไม่ปล่อยความร้อนออกไป ควรจะนำอุปกรณ์ไปตรวจสอบโดยผู้จำหน่าย ก่อนที่จะทำการเปิดใช้เครื่องอีกครั้ง
- หากสายไฟเชื่อมต่อหลักของอุปกรณ์เสียหาย ให้ถอดออกจากตัวเครื่องแล้วนำไปกำจัดก่อน หากไม่สามารถถอดออกได้ต้องกำจัดอุปกรณ์

• ในขณะที่เปิดแผ่นให้ความอบอุ่นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :

- ห้ามวางสิ่งของบนแผ่นรอง (เช่นกระเป๋าเดินทาง หรือ ตะกร้าซักผ้า)
- ห้ามวางของที่มีความร้อน เช่น ขวดน้ำร้อน แผ่นให้ความอบอุ่น หรือสิ่งที่คล้ายกัน

บนตัวแผ่นรอง

• ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวควบคุมความร้อนจะสร้างความร้อนขึ้นเมื่อ

เปิดใช้แผ่นให้ความอบอุ่น ด้วยเหตุนี้จึงต้องไม่นำแผ่นให้ความอบอุ่นมาวางทับ หรือตัว

ควบคุมอุณหภูมิไว้บนแผ่นให้ความอบอุ่นขณะกำลังใช้งาน

- ผู้ใช้งานควรหมั่นสังเกต หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน (ส่วนที่ 4) การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา (ส่วนที่ 5) และ การจัดเก็บ (ส่วนที่ 6)
- หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

3. วัตถุประสงค์

⚠ สำคัญ

แผ่นให้ความอบอุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้อ่างกายมนุษย์อบอุ่นขึ้นเท่านั้น

4. การทำงาน

4.1 ความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง

แผ่นให้ความอบอุ่นมีการติดตั้งระบบความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ช่วยในการป้องกันความร้อนสูงเกินไปทั่วทั้งพื้นผิวของแผ่นทำความร้อน โดยการปิดอัตโนมัติในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด หากระบบความปลอดภัยปิดแผ่นทำความร้อน จอแสดงผลที่ตัวควบคุมอุณหภูมิจะไม่เรืองแสงเมื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง

โปรดทราบว่า ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแผ่นความร้อนจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

หลังจากเกิดข้อผิดพลาด และ ต้องส่งไปยังศูนย์บริการลูกค้า


ห้ามเชื่อมต่อแผ่นให้ความอบอุ่นที่มีข้อบกพร่อง กับตัวควบคุมอุณหภูมิรุ่นอื่น การเชื่อมต่อจะกระตุ้นให้เกิดการปิดการใช้งานอย่างถาวรของอุปกรณ์ผ่านระบบความปลอดภัยที่ตัวควบคุมอุณหภูมิ

4.2 การใช้งานเบื้องต้น

⚠ สำคัญ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นให้ความอบอุ่นไม่ทับกัน หรือปะทะระหว่างการใช้งาน

- ขั้นแรกให้เชื่อมต่อตัวควบคุมอุณหภูมิเข้ากับแผ่นให้ความอบอุ่น
- โดยเสียบข้อต่อสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นให้ความอบอุ่น
- จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

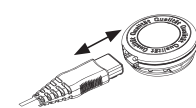

4.3 การเปิดสวิตช์

ในการเปิดการทำงานแผ่นให้ความอบอุ่น ให้ตั้งสวิตช์เลื่อนสำหรับเปิด / ปิด และ การตั้งค่าอุณหภูมิไปที่การตั้งค่า 1, 2 หรือ 3 จอแสดงผลแบบเรืองแสงสำหรับการตั้งค่าอุณหภูมิ (4) จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง

4.4 การตั้งค่าอุณหภูมิ

ระดับ 0: ปิดเครื่อง

ระดับ 1: ทำความร้อนระดับต่ำสุด

ระดับ 2: ทำความร้อนระดับกลาง

ระดับ 3: ทำความร้อนระดับสูงสุด

⚠️ หมายเหตุ

• วิธีที่เร็วที่สุดในการอุ่นเครื่องแผ่นความให้ร้อน คือตั้งค่าอุณหภูมิเป็นระดับสูงสุดในตอนแรก

⚠️ หมายเหตุ

• แผ่นให้ความอบอุ่นเหล่านี้มีระบบทำความร้อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ตัวแผ่นให้ความร้อนอุ่นเร็วขึ้นใน 10 นาทีแรก



⚠️ คำเตือน

หากมีการใช้แผ่นให้ความอบอุ่นเป็นเวลาหลายชั่วโมง แนะนำให้ตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิที่ระดับต่ำสุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุณหภูมิของร่างกายที่ใช้งานแผ่นให้ความอบอุ่นสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้

4.5 การปิดอัตโนมัติ

แผ่นให้ความอบอุ่นมาพร้อมกับปิดอัตโนมัติ ระบบนี้จะปิดแหล่งจ่ายความร้อน

ทันที หลังจากใช้งานแผ่นให้ความอบอุ่นไปแล้วประมาณ 90 นาที จากนั้นหน้า

จอการตั้งค่าอุณหภูมิจะเริ่มกะพริบไฟ เพื่อให้สามารถเปิดแผ่นให้ความอบอุ่นได้

อีกครั้ง โดยการเปิดใช้งานอีกครั้ง ต้องเลื่อนสวิตช์สำหรับเปิด / ปิด และ ตั้งค่าอุณหภูมิ (5) ลง

ไปที่ค่า “ 0 ” (ปิด) ก่อน ทิ้งไว้ประมาณ 5 วินาทีจึงจะสามารถเปิดได้อีกครั้ง



4.6 การปิดเครื่อง

การปิดแผ่นให้ความอบอุ่น ให้เลื่อนสวิตช์สำหรับเปิด / ปิด และ ตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ค่า "0"

(ปิด) จอแสดงผลแบบเรืองแสงสำหรับการตั้งค่าอุณหภูมิ (4) จะดับลง

⚠️ หมายเหตุ

หากไม่ได้ใช้งานแผ่นให้ความอบอุ่น ให้เลื่อนสวิตช์สำหรับเปิด / ปิด และ การตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ค่า “ 0 ” (ปิด) แล้วถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ จากนั้นถอดตัวควบคุมอุณหภูมิออกจากแผ่นให้ความอบอุ่นโดยการถอดข้อต่อออกจากแผ่นให้ความอบอุ่น

5. การทำความสะอาด และ เก็บรักษา

⚠️ คำเตือน

• ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับก่อนทุกครั้ง จากนั้นถอดตัวควบคุมอุณหภูมิออกจากแผ่นให้ความอบอุ่น โดยถอดข้อต่อออกจากแผ่นให้ความอบอุ่น เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

⚠️ สำคัญ

• ตัวควบคุมอุณหภูมิต้องไม่สัมผัสกับน้ำ หรือ ของเหลวอื่น ๆ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ในการทำความสะอาดตัวควบคุมอุณหภูมิ ให้ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย อย่าใช้สารเคมี หรือ สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน รอยเล็ก ๆ บนแผ่นทำความร้อนสามารถลบออกได้ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และถ้าจำเป็นให้ใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าที่บอบบางเล็กน้อยในการทำความสะอาด

⚠️ สำคัญ

• แผ่นให้ความอบอุ่นไม่สามารถผ่านกระบวนการทำความสะอาดด้วยวิธี การใช้สารเคมี การบิด การปั่นให้แห้ง การรีดผ้าด้วยกาบรด หรือ การรีดโดยใช้ความร้อน แผ่นให้ความอบอุ่นสามารถซักในเครื่องซักผ้าได้ ตั้งค่าเครื่องซักผ้าเป็นระบบการซักแบบถนอมผ้าเป็นพิเศษที่อุณหภูมิ 30 ° C (ระบบการซักผ้าขนสัตว์) ใช้น้ำยาซักผ้าแบบอ่อนโยน และ วัตปริมาณที่ต่อจใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

⚠️ สำคัญ

• การซักแผ่นให้ความอบอุ่นบ่อยครั้ง จะก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นควรซักแผ่นให้ความอบอุ่นในเครื่องซักผ้า สูงสุด 10 ครั้งตลอดอายุการใช้งานควรคลี่แผ่นความร้อนให้มีขนาดเดิมทันทีหลังจากการซัก ในขณะที่ยังชื้นอยู่ และกางออกให้เรียบบนราวแขวนผ้าแบบตะแกรงเพื่อให้แห้งสนิท

⚠️ สำคัญ

• อย่าใช้หมุดหรือสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกันในการยึดแผ่นให้ความอบอุ่นกับราวแขวนผ้าแบบตะแกรง มิฉะนั้นแผ่นให้ความอบอุ่นเกิดความเสียหายได้

• ห้ามเชื่อมต่อสวิตช์เข้ากับแผ่นให้ความอบอุ่น จนกว่าข้อต่อสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นให้ความอบอุ่น และ ตัวแผ่นให้ความอบอุ่นจะแห้งสนิท มิฉะนั้นแผ่นให้ความอบอุ่นอาจเกิดความเสียหายได้

⚠️ คำเตือน

• ห้ามเปิดแผ่นให้ความอบอุ่น เพื่อทำให้แห้ง มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

6. การเก็บรักษา

หากคุณไม่ได้ใช้แผ่นให้ความอบอุ่นเป็นเวลานาน แนะนำให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม และให้ถอด

ตัวควบคุมอุณหภูมิ และ ข้อต่อออกจากแผ่นให้ความอบอุ่น

⚠️ สำคัญ

• โปรดปล่อยให้แผ่นความร้อนเย็นลงก่อนจัดเก็บ มิฉะนั้นแผ่นความร้อนอาจเสียหาย

• เพื่อหลีกเลี่ยงการพับคมในแผ่นทำความร้อนอย่างว่องว่องสิ่งของใด ๆ ด้านบนในขณะที่กำลังจัดเก็บ

7. การกำจัดสินค้าเมื่อหมดอายุการใช้งาน

ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนเมื่อหมดอายุการใช้งาน ให้ทิ้งเครื่องที่จรวบรวม หรือ รีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสม ควรทิ้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์) หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะ



8. ถ้ามีปัญหาจะทำอย่างไร?

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
จอแสดงผลแบบเรืองแสงสำหรับการตั้งค่าอุณหภูมิจะไม่สว่างขึ้นในขณะที่ - ตัวควบคุมเชื่อมต่อกับแผ่นทำความร้อนอย่างถูกต้อง - ปลั๊กไฟหลักเชื่อมต่อกับเต้ารับที่ใช้งานได้ - สวิตช์เลื่อนถูกตั้งค่าเป็น 1, 2 หรือ 3	ระบบความปลอดภัยปิดแผ่นความร้อนอย่างถาวร	ส่งแผ่นให้ความอุ่นและตัวควบคุมอุณหภูมิให้กับผู้จัดจำหน่าย เพื่อซ่อมบำรุง

9. ข้อมูลทางเทคนิค

สังเกตตราประทับบนแผ่นให้ความอบอุ่น

10. การรับประกัน/บริการหลังการขาย

ในกรณีที่มีการส่งคืนสินค้าตามสิทธิภายใต้การรับประกัน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือ ตัวแทนในพื้นที่ซึ่งระบุไว้ในรายการ "บริการระหว่างประเทศ" ในกรณีที่ส่งคืนเครื่องโปรดแนบสำเนาใบเสร็จและรายงานสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่อง การรับประกันต้องจะถูกบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

- ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของ BEURER คือ 3 ปีหรือหากนานกว่านั้น – การรับประกันเฉพาะประเทศ ระยะเวลาเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า
- ในกรณีของการเรียกร้องการรับประกันวันที่ซื้อจะต้องได้รับการพิสูจน์โดยใบเสร็จการขายหรือใบแจ้งหนี้

2. กรณีมีการซ่อมแซม (ตัวเครื่องหรือชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่อง) จะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันจากวันที่มีการซ่อมแซม

3. การรับประกันจะไม่สามารถใช้ได้กับความเสียหายเนื่องจาก

- การรักษาที่ไม่เหมาะสมเช่น การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน
- การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงโดยลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือ ระหว่างการขนส่งไปยังศูนย์บริการ
- การรับประกันจะไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมที่มีการศึกษาหรือตามปกติ (เช่น ผ้ารัดข้อมือ แบตเตอรี่ เป็นต้น)

4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากตัวเครื่อง ถึงแม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องจะได้รับการยอมรับเป็นภายใต้เงื่อนไขการเรียกร้องสิทธิการรับประกันก็ตาม

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.แก้วโกโล 23 ถ.แก้วโกโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านขายฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม fanpage : beurerthailand

LINE line: @beurerthai line: @service

โทร. 098-2805777