




เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน

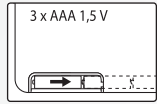


1. พลิกด้านหลังเครื่องเพื่อใส่ถ่าน AAA จำนวน 3 ก้อน และทำการปิดฝาครอบถ่านให้เรียบร้อย

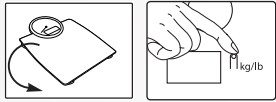


2. พลิกด้านหลัง เพื่อเลือกหน่วยการวัดให้เป็นกิโลกรัม หรือปอนด์ โดยการกดปุ่มนี้ ที่ด้านหลังเครื่อง

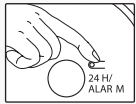

3. กดปุ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือน สำหรับการเทียบค่าน้ำหนักภายใน 24 ชั่วโมง

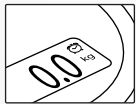


4. หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์รูปนาฬิกา พร้อมกับค่าน้ำหนัก

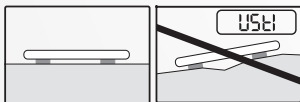

5. วางเครื่องชั่งน้ำหนักในตำแหน่งที่เป็นพื้นราบ ไม่แนะนำให้วางบนพื้นลามิเนต หรือ พรม

beurer คู่มือการใช้งาน GS58 HEALTH AND WELL-BEING GLASS SCALE

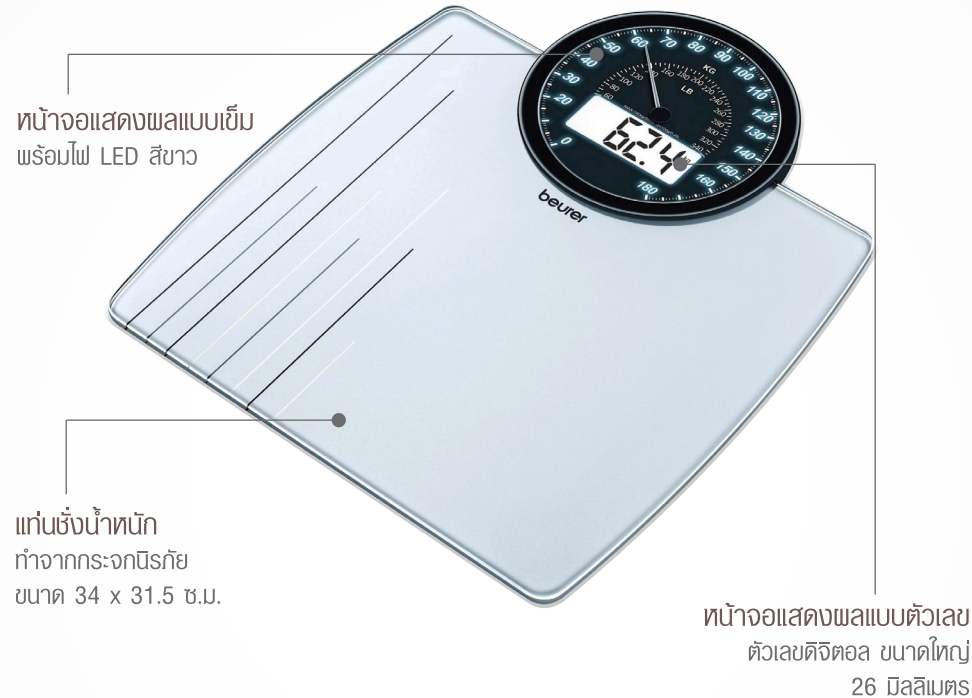

หน้าจอแสดงผลแบบเข็มพร้อมไฟ LED สีขาว


แท่นชั่งน้ำหนักทำจากกระจกนิรภัยขนาด 34 x 31.5 ซม.

หน้าจอแสดงผลแบบตัวเลขตัวเลขดิจิทัล ขนาดใหญ่ 26 มิลลิเมตร



BEURER พลิกทัศน์คุณภาพชั้นนำ จากประเทศเยอรมนี
“ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ พร้อมการบริการที่ดีเยี่ยม”

เริ่มต้นการใช้งาน

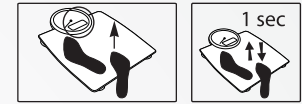

1. ก้าวขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนัก
*สำหรับการใช้งานครั้งแรกหรือเมื่อมีการย้ายตำแหน่งให้ขึ้นชั่งซ้ำ หลายๆ ครั้ง



2. เครื่องจะแสดงผลทั้งแบบดิจิทัลและแบบเข็ม จะมีไฟสีเขียวสว่างขึ้นเพื่อช่วยให้อ่านค่าได้ง่าย



3. ภายใน 10 วินาที หากไม่มีการใช้งานใดๆ เครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติ



สัญลักษณ์เตือนความจำเกินกว่าที่กำหนด



แบตเตอรี่รื้ออ่อนให้ตรวจสอบแบตเตอรี่

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกลีไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3
ช.แก๊กโล 23 ถ.แก๊กโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110 แฟกซ์: 038-314119
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
fanpage : <https://www.facebook.com/beurerthai>



line: @beurerthai



โทร. 038-314118