




เตรียมพร้อมก่อนเริ่มใช้งาน

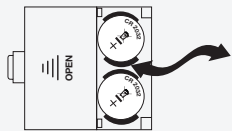


1. พลิกด้านหลังเครื่องเพื่อใส่ถ่าน
CR 2032 จำนวน 2 ก้อน
จากนั้นทำการปิดฝาครอบให้เรียบร้อย

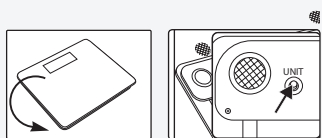


2. พลิกด้านหลัง เพื่อเลือกหน่วยการชั่ง
ให้เป็นกิโลกรัม ปอนด์ หรือสโตน
โดยการกดปุ่มตามลูกศร ที่ด้านหลังเครื่อง

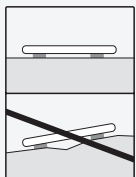

3. วางเครื่องชั่งน้ำหนักในตำแหน่งที่เป็นพื้นราบ
ไม่แนะนำให้วางบนพื้นลามิเนต หรือพรม

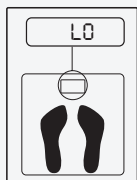

สัญลักษณ์เตือน
แบตเตอรี่อ่อน

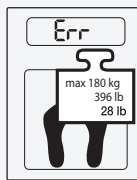

สัญลักษณ์เตือน
ความจุเกินกว่าที่กำหนด

beurer

คู่มือการใช้งาน GS230
HEALTH AND WELL-BEING GLASS SCALE




พื้นชั่งน้ำหนัก
ขนาด 30 x 30 ซม.

หน้าจอแสดงผลแบบตัวเลข
ขนาดใหญ่ 39 มม.




BEURER ผลิตภัณฑคุณภาพชั้นนำ จากประเทศเยอรมนี
“ผลิตภัณฑชั้นเลิศ พร้อมบริการที่ดียเยี่ยม”


เริ่มต้นการใช้งาน

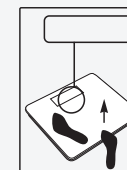

1. ก้าวขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนัก
*สำหรับการใช้งานครั้งแรกหรือมีการย้ายตำแหน่ง
ให้ชั่งซ้ำ หลายๆ ครั้ง

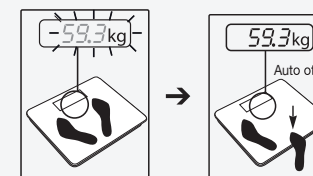

2. เครื่องจะแสดงผลแบบระบบดิจิทัล

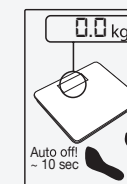

3. ภายใน 10 วินาที หากไม่มีการใช้งาน
เครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติ

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
fanpage : beurerthailand

line : @beurerthai