

คู่มือการใช้งาน

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมัลติฟังก์ชัน
FT65

6-in-1
function

6 in 1



beurer

6 in 1

- ✓ ตรวจสอบอุณหภูมิบนหน้าผาก
- ✓ ตรวจสอบอุณหภูมิภายในหู
- ✓ ตรวจสอบอุณหภูมิได้ทั้ง วัตถุประสงค์ / ของเหลว
- ✓ แสดง วันที่ และ เวลา
- ✓ บันทึกค่าความจำได้ 10 ค่า
- ✓ ไฟ LED แฉ่งเตือนเมื่อมีอุณหภูมิสูง




ไฟสีเขียว
อุณหภูมิปกติ



ไฟสีแดง
มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 38°C


รายละเอียดอุปกรณ์

1. ฝาสำหรับวัดทางหน้าผาก / ฝาครอบ
2. ปุ่มโหมดวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก
3. ปุ่มโหมดวัดอุณหภูมิทางหู / ปุ่มเปิด-ปิด
4. LED (สีแดง) (สัญญาณแจ้งเตือนอุณหภูมิสูง)
5. LED (สีเขียว)
6. จอแสดงผล LCD
7. เซ็นเซอร์พร้อมเลนส์ (ถอดฝาครอบออก)
8. ปุ่มบันทึกหน่วยความจำ
9. ปุ่มตั้งค่า Set
10. ฝาปิดช่องใส่ถ่าน
11. วันที่
12. เวลา
13. โหมดการวัด (“หู”, “หน้าผาก”, “วัตถุประสงค์”)
14. สัญลักษณ์เตือนถ่านอ่อน
15. จอแสดงผลการวัด
16. สัญลักษณ์ “หน่วยความจำ”
17. สัญลักษณ์ “กำลังดำเนินการวัด”
18. หน่วยของการวัด (°C หรือ °F)

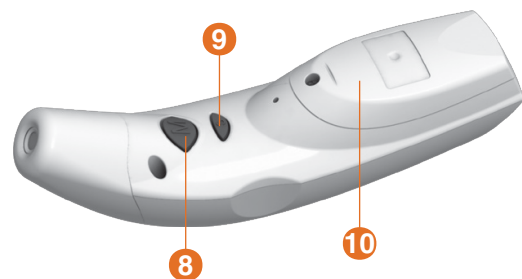

การตั้งค่าอุปกรณ์


1

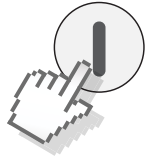

กดปุ่ม ① ค้างไว้เป็นเวลา 1 วินาที เพื่อเปิดเครื่องวัดอุณหภูมิ

หน้าจอจะแสดงผลเป็น “ - - ”

2

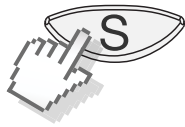

กดปุ่ม S ประมาณ 3 วินาที เพื่อการเข้าถึงโหมดตั้งค่า ค่าเปลี่ยนแปลง จะกระพริบทุกครั้ง

3

หน้าจอ 1-1 00:00 จะปรากฏ และเข้าสู่การตั้งค่าหน่วย - ปี - เดือน - วัน - ชั่วโมง - นาที ตามลำดับ



กดปุ่ม S เพื่อเลือกสลับ

กดปุ่ม M เพื่อยืนยัน

การวัดอุณหภูมิ


การวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก มี 2 วิธี

1




เปิดเครื่องวัดอุณหภูมิ จากนั้นเล็งเครื่องไปที่หน้าผาก เว้นระยะห่างประมาณ 1-2 ซม. แล้วกดปุ่ม ☺ ค้างไว้ 1 วินาที เพื่อทำการวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก

2

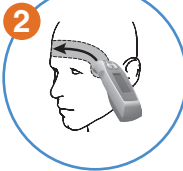


หากต้องการความแม่นยำ ให้วางปลายหัววัดไปที่ขมับ โดยให้ฝาครอบติดกับขมับ แล้วกดปุ่ม ☺ ค้างไว้ หากเครื่องวัดอุณหภูมิจากอีกด้านหนึ่งไปยังอีกด้านของหน้าผากและปล่อยปุ่ม ☺ เพื่อสิ้นสุดการวัด

การวัดอุณหภูมิทางหู

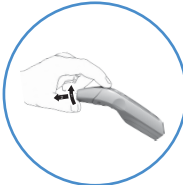

ถอดฝาปิดโดยค่อยๆ ดันขึ้นจากนั้นดึงออกมาข้างหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายเซ็นเซอร์และช่องหูสะอาด

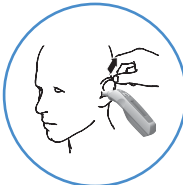

ดึงหูขึ้นและลงเล็กน้อยสอดปลายเซ็นเซอร์ ให้ปลายหัวเซ็นเซอร์สามารถชี้ไปที่แก้วหูได้โดยตรง ใส่ปลายเซ็นเซอร์ทางช่องหูอย่างระมัดระวัง จากนั้นกดปุ่ม ๗ / ① ค้างไว้ 1 วินาที เพื่อทำการวัดอุณหภูมิทางหู

การวัดอุณหภูมิวัดตุ



กดปุ่มเปิดเครื่องวัดอุณหภูมิ จากนั้นกดปุ่ม M และ ① พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดอุณหภูมิวัดตุ สัญลักษณ์ ๗ จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผลแล้วเล็งปลายเซ็นเซอร์ไปทางวัดตุหรือของเหลว โดยเว้นระยะห่างประมาณ 3 ซม. จากนั้นกดปุ่ม ① / ☺ เพื่อทำการวัดอุณหภูมิวัดตุ

แจ้งเตือนอุณหภูมิปกติ และ อุณหภูมิสูง ผ่านทางไฟ LED

เขียว = อุณหภูมิปกติ แดง = มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 38°C หรือ 100.4°F

ช่วงการวัด หน้าผาก/หู : 93.2°F - 109.4°F (34°C - 43°C) วัดตุ : 32°F - 212°F (0°C - 100°C)

การอ่านค่า

เครื่องสามารถบันทึกค่าได้ 10 ค่า ในการเรียกดูค่าที่บันทึกไว้เปิดสวิตช์เครื่องวัดอุณหภูมิแล้วกดปุ่ม M วันที่, เวลา, หมายเลขพื้นที่จัดเก็บ, สัญลักษณ์โหมดการวัด และอุณหภูมิ จะแสดงตามลำดับ เรียกดูการวัดที่เก็บไว้โดยกดปุ่ม M ซ้ำ ๆ

การเปลี่ยนถ่าน

สัญลักษณ์เตือนถ่านกะพริบ และ Lo ปรากฏขึ้นบนหน้าจอจะต้องเปลี่ยนถ่าน หากแบตเตอรี่ในถ่านอ่อนเกินไปเครื่องวัดอุณหภูมิจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

1. คลายน็อตสกรูบนฝาปิดช่องใส่ถ่านแล้วดึงฝาปิดลงมา
2. เปลี่ยนใส่ถ่านก้อนใหม่สองก้อนตามทิศทางที่ระบุ
3. ปิดฝาช่องใส่ถ่านและไขกลับเข้าไปใหม่



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลมเมทไทย จำกัด สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23

ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 098-2805777

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

08.2020_REV.0000



fanpage : beurerthailand



line: @beurerthai
line: @service



โทร. 098-280-5777