


**สัญลักษณ์คำเตือนต่างๆ**

 อ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งาน	 ห้ามใช้น้ำยาซักฟอก
 ห้ามกลัดเข็มกลัด	 ห้ามเข้าเครื่องอบผ้า
 ห้ามพับ หรือม้วนอุปกรณ์	 ห้ามรีด
 ไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี	 ห้ามซักแห้ง
 ทำความสะอาดอุปกรณ์ ด้วยโปรแกรมซักผ้าแบบอ่อนโยน ที่อุณหภูมิ 30 °C	 สิ่งทอที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน Oeko-Tex standard 100 โดยสถาบันวิจัยด้านสิ่งทออิสระในประเทศออสเตรียและเยอรมนี (The Austrian Textile Research Institute and The German Hohenstein Research Institute)
 <b>คำเตือน:</b> เตือนถึงความเสี่ยงของการบาดเจ็บ หรือที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
 <b>ข้อควรระวัง:</b> ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์	
 <b>หมายเหตุ:</b> ข้อมูลที่มีความสำคัญ	

**1. สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง**


- ผ้าปูเตียงให้ความร้อน 1 ผืน
- รีโมทควบคุมการทำงาน 1 เครื่อง
- คู่มือการใช้งาน ไทย/อังกฤษ

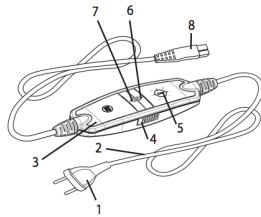

**1.1 รายละเอียดอุปกรณ์**

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. ปลั๊กไฟ                    | 5. หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิ    |
| 2. สายไฟ                      | 6. △ - ปุ่ม เพิ่มอุณหภูมิ   |
| 3. รีโมทควบคุมการทำงาน        | 7. ▽ - ปุ่ม ลดอุณหภูมิ      |
| 4. ปุ่มสไลด์ เปิด/ปิด อุปกรณ์ | 8. สายต่อรีโมทกับผ้าปูเตียง |

**2. คำแนะนำสำคัญ**

 **คำเตือน**


- หากไม่อ่านคู่มือแนะนำการใช้งานด้านล่างนี้ สามารถนำไปสู่อันตรายก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ (ไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้, ไฟไหม้) การทำตาม

คำแนะนำเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อสุขภาพของท่านเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อคนอื่นอีกด้วย ทั้งยังช่วยป้องกันอุปกรณ์ ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรอ่าน และทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียด

- ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ ไม่ควรถูกใช้โดยผู้ที่ไม่ไวต่อความร้อน หรือผู้ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความร้อนได้
- ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ ไม่ควรใช้ในเด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี เนื่องจากเด็กเล็กนั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความร้อนสูงได้
- ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ ไม่ควรถูกใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 3-8 ปีโดยลำพัง นอกเสียจากว่า ผ้าปูเตียงให้ความร้อน จะถูกตั้งค่าการใช้งาน โดยผู้ปกครอง หรือเด็กได้รับคำแนะนำในการใช้งานอย่างปลอดภัยจากผู้ปกครอง
- ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ควรให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้
- การทำความสะอาด และบำรุงรักษา ไม่ควรถูกระทำเพียงลำพังโดยเด็ก ควรให้ผู้ปกครองให้การดูแลและคำแนะนำด้วย
- ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล
- ห้ามกลัดเข็มกลัดบนอุปกรณ์
- ห้ามม้วน หรือกอง ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้
- ห้ามใช้งานผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ หากผ้าเปียกอยู่
- หากผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ ถูกใช้บนเตียงไฟฟ้าที่ปรับได้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผ้าปูเตียงให้ความร้อน และสายไฟ ไม่ได้ติด หรือม้วนอยู่กับบานพับของเตียง
- ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ ต้องถูกใช้กับรีโมทควบคุมการทำงาน ที่มีเครื่องหมายผลการจัดอันดับความร้อนของผ้าปูเตียงให้ความร้อนเท่านั้น
- สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ปล่อยออกมาจากผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ อาจเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ โดยขัดจำกัดที่อนุญาตมีดังนี้:  
ความเข้มของสนามไฟฟ้า: สูงสุด 5,000 โวลต์/เมตร  
ความแรงของสนามแม่เหล็ก: สูงสุด 80 แอมแปร์/เมตร  
ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก: สูงสุด 0.1 มิลลิเทสลา
- โปรดปรึกษาแพทย์ และผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามดึง, บิด หรือทำให้สายเป็นปม
- ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ จะได้รับการตรวจสอบสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายเสมอหากมีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อทำการเปลี่ยน หรือซ่อมแซม
- หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องถูกซ่อมแซม หรือเปลี่ยนโดยผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
- ในขณะที่เปิดใช้งานอุปกรณ์
  - ห้ามวางวัตถุใดๆ บนผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ เช่น กระเป๋าเดินทาง, ตะกร้าผ้า
  - ห้ามวางแหล่งความร้อนใดๆ บนผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ เช่น ขวดน้ำร้อน, แผ่นทำความร้อน

- เมื่อเปิดใช้งานผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ รีโมทควบคุมการทำงานจะมีความอุ่นเล็กน้อย ดังนั้นรีโมทควบคุมการทำงานไม่ควรถูกวางใต้ หรือบนผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้
  - หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
  - โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
- การทำงาน หัวข้อที่ 5, การทำความสะอาดและการดูแลรักษา หัวข้อที่ 6, การเก็บรักษา หัวข้อที่ 7

**3. การใช้งานที่เหมาะสม**

 **ข้อควรระวัง**

ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ มีไว้ใช้เพื่อให้เตียงอุ่นเท่านั้น

**4. การเคลือบด้วยวัสดุ PURE® silver**



ผืนผ้าปูเตียงให้ความร้อนถูกเคลือบด้วยวัสดุที่ทำจากเงินแท้ (UB60: ด้านที่มีลายกราฟฟิค) ด้วยวัสดุพิเศษนี้จะช่วยเพิ่มสุขอนามัย โดยจะช่วยลดการสะสมของกลิ่น และแบคทีเรีย ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดได้ โดยไม่หลุดออก

**5. การใช้งาน**

**5.1 ด้านความปลอดภัย**

 **ข้อควรระวัง**

ผ้าปูเตียงให้ความร้อนนี้ เป็นอุปกรณ์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีเทคโนโลยีเซนเซอร์คอยตรวจจับความร้อน หากอุปกรณ์นี้ปล่อยความร้อนออกมามากเกินไป ซึ่งเป็นการทำงานที่ผิดปกติ อุปกรณ์จะทำการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ หากระบบความปลอดภัยทำการปิดระบบผ้าปูเตียงนี้ ในกรณีที่เหตุการณ์ผิดพลาด รีโมทควบคุมการทำงานจะไม่มีไฟแสดงสถานะใดๆ เกิดขึ้น แม้ว่าปุ่ม เปิด/ปิด ของผ้าปูเตียงจะอยู่ในตำแหน่งเปิดอยู่ก็ตาม

โปรดทราบว่า หากผ้าปูเตียงให้ความร้อนไม่ทำงาน เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว ต้องส่งอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า เพื่อทำการตรวจสอบ และซ่อมแซม

**5.2 การจัดวางอุปกรณ์ในการใช้งาน**

วางอุปกรณ์ลงบนที่นอนของคุณ โดยจากหัวเตียงจนถึงปลายเท้า จากนั้นจัดวางอุปกรณ์ให้อยู่ระหว่างผ้าปูเตียงและเตียงนอนของคุณ

 **ข้อควรระวัง**

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ถูกปูอย่างเรียบร้อย ไม่พับ หรือม้วนอุปกรณ์ขณะใช้งาน

- เมื่อต้องการใช้งาน รีโมทควบคุมการทำงานจะต้องถูกเชื่อมต่อกับผ้าปูให้ความร้อน
- จากนั้นให้เสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้าน

### 5.3 การเปิดใช้งานอุปกรณ์

เลื่อนปุ่ม เปิด/ปิด อุปกรณ์ (4.) ไปที่ตำแหน่งเปิด ( I ) เมื่อสวิตช์เปิด หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิจะสว่างขึ้น

### 5.4 ระดับการตั้งค่าอุณหภูมิ

หากต้องการเพิ่มค่าอุณหภูมิให้กดปุ่ม  $\Delta$  (6.) และต้องการลดอุณหภูมิให้กดปุ่ม  $\nabla$  (7.) หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิจะสว่างขึ้น

#### อุณหภูมิระดับต่างๆ

การตั้งค่า	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4
อุณหภูมิ	30-35°C	40-45°C	50-55°C	60-65°C

### $\Delta$ คำเตือน

หากต้องใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมง ควรปรับระดับอุณหภูมิไว้ที่ระดับต่ำสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้

### *i* หมายเหตุ

- วิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้ผ้าปูเตียงมีความร้อนอย่างรวดเร็ว คือ ให้เลือกระดับความร้อนสูงสุดในการเปิดสวิตช์ครั้งแรก
- แนะนำให้เปิดอุปกรณ์ไว้บนเตียงก่อนการใช้งานประมาณ 30 นาที และคลุมที่นอนไว้ด้วยผ้าห่ม เพื่อไม่ให้ความร้อนกระจายออกสู่ด้านนอก

### 5.5 การลดระดับอุณหภูมิอัตโนมัติ

### *i* หมายเหตุ

อุปกรณ์มีฟังก์ชันการลดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ โดยหากตั้งอุณหภูมิไว้ที่ระดับ 3 และ 4 หลังจากอุปกรณ์ทำงานมา 3 ชั่วโมง จะทำการลดอุณหภูมิเหลือ อยู่ที่ระดับ 2 เองโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของผูู้ใช้งาน

### 5.6 การปิดเครื่องอัตโนมัติ

อุปกรณ์มีฟังก์ชันการปิดเครื่องอัตโนมัติ โดยจะปิดภายในเวลา 12 ชั่วโมงหลังจากเปิดการใช้งานในครั้งแรก

หากต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์อีกครั้ง ปุ่มสไลด์ เปิด/ปิด อุปกรณ์ (4.) จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด ( 0 ) เป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ 5 วินาที จากนั้นจึงจะเปิดใช้งานอุปกรณ์ได้อีกครั้ง

### 5.7 การปิดใช้งานอุปกรณ์

เลื่อนปุ่ม เปิด/ปิด อุปกรณ์ (4.) ไปที่ตำแหน่งปิด ( 0 ) เมื่ออุปกรณ์ถูกปิด หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิจะดับลง


### *i* หมายเหตุ

หากไม่มีการใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลาหลายวัน ควรปิดอุปกรณ์ และถอดปลั๊กทั้งหมดออกจากตัวอุปกรณ์ด้วย

### 6. การทำความสะอาด และการดูแลรักษา

#### $\Delta$ คำเตือน

ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน และถอดสายเชื่อมต่อรีโมทควบคุมการทำงานกับอุปกรณ์ออกจากกัน

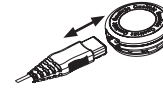

#### $\Delta$ ข้อควรระวัง

- ห้ามวางรีโมทควบคุมการทำงานใกล้กับน้ำ หรือของเหลวใดๆ เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหาย

ทำความสะอาดอุปกรณ์โดยใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมี หรือสารกัดกร่อน และสำหรับคราบขนาดเล็กสามารถเช็ดออกได้ด้วยผ้า หรือฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หากจำเป็นสามารถผสมกับน้ำยาซักผ้าสูตรอ่อนโยนได้

#### $\Delta$ ข้อควรระวัง

- โปรดทราบว่าอุปกรณ์นี้ไม่สามารถซักแห้ง, บิด, เครื่องอบผ้า หรือรีดได้ สามารถนำไปซักในเครื่องซักผ้าได้ โดยควรตั้งโปรแกรมซักผ้าแบบอ่อนโยนที่อุณหภูมิ 30°C (โปรแกรมซักชุดขนสัตว์) ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสูตรอ่อนโยน และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องซักผ้า

#### $\Delta$ ข้อควรระวัง

- โปรดทราบว่าหากซักอุปกรณ์บ่อยจนเกินไป อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้ กำหนดให้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ไม่เกิน 5 ครั้ง หลังจากการซักทำความสะอาดอุปกรณ์แล้วควรตากอุปกรณ์ให้แห้ง โดยคลี่อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเดิม

#### $\Delta$ คำเตือน

- ห้ามดัดเข็มกลัด, หมุด หรือวัตถุที่มีลักษณะเดียวกันนี้บนอุปกรณ์
- ห้ามเสียบปลั๊กใดๆ กับอุปกรณ์จนกว่าอุปกรณ์จะแห้งสนิท
- ห้ามเปิดใช้งานอุปกรณ์ จนกว่าอุปกรณ์จะแห้งสนิท

### 7. การเก็บรักษา

หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ตามเดิม

#### $\Delta$ ข้อควรระวัง

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ อย่าพับอุปกรณ์ โดยวางสิ่งของทับด้านบน

ระหว่างเก็บรักษาและก่อนการจัดเก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง ควรรอให้อุปกรณ์ลดอุณหภูมิจนเย็นลงก่อน

### 8. การกำจัดทิ้ง

โปรดกำจัดอุปกรณ์ให้สอดคล้องตามระเบียบการจัดการของเสียจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) 2002/96/EC หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับในท้องถิ่น หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของคุณ



### 9. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีแสงสว่างบนหน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิ ในกรณีดังต่อไปนี้: - รีโมทควบคุมการทำงานถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รีเลย์หรือทำงานเรียบริเลย์ - เสียบสายไฟเชื่อมต่อการทำงานเรียบริเลย์ - ปุ่ม เปิด/ปิด อุปกรณ์ เลื่อนอยู่ที่ตำแหน่ง เปิดใช้งาน ( I )	ระบบป้องกันความปลอดภัยทำการปิดการทำงานของอุปกรณ์อย่างถาวร	ส่งอุปกรณ์มาที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ

### 10. ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด: 150 x 80 เซนติเมตร  
กำลังไฟฟ้า: 60 วัตต์

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลแมกส์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 แฟกซ์: 038-314119

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942

