

เรียนลูกค้า

เรียนคุณลูกค้า ขอขอบคุณที่เลือกสินค้าของเรา ชื่อเสียงของเราโด่งดังเรื่องคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบอย่างละเอียดอาทิเช่น อุปกรณ์ให้ความอบอุ่นเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเครื่องนวด อุปกรณ์ด้านความงาม อุปกรณ์สำหรับเด็ก และเครื่องกรองอากาศ โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานบอยเลอร์

- เครื่องดูดน้ำมูกเด็ก 1 ชิ้น
- ซิลิโคนแบบบาง 1 ชิ้น
- ซิลิโคนกว้าง 1 ชิ้น
- ถ่าน AA 2 ก้อน

• คู่มือการใช้งาน

1. ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ของคุณ เครื่องดูดน้ำมูกเด็ก รุ่นใหม่ NA 20

สามารถดูดน้ำมูกจากทารกเด็กเล็กและเด็กได้อย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ (ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่าเด็ก) เครื่องดูดน้ำมูกเด็ก สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเมื่อทำความสะอาดแล้ว รวมไปถึงการฆ่าเชื้อซิลิโคนที่แนบมา ที่เก็บสารคัดหลั่งจมูก ซิลิยางและวาล์วตลอดจนพื้นผิวอุปกรณ์ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป ควรเปลี่ยนหากมีผู้ใช้อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งคน ทางเราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนชุดซิลิโคนทั้งหมดอย่างน้อย 1 ชุดต่อหนึ่งปี

เครื่องดูดน้ำมูกเด็ก มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- ใช้งานง่าย (ด้วยการออกแบบปั๊มเดียว)
- ซิลิโคนนุ่มและยืดหยุ่นได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และสะดวกสบายของโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- มอเตอร์ทรงพลังแรงดันดูดสูงสุด 500 mmHg (66 กิโลปาสกาล)
- การออกแบบที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้แบบพกพา
- การทำงานที่เงียบ สามารถใช้ในขณะที่เด็กนอนหลับได้อีกด้วย
- การป้องกันการไหลย้อน - ไม่มีการไหลย้อนกลับจากภาชนะจากเครื่องดูดน้ำมูกเด็กกลับไปที่จมูก
- ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
- ถูกสุขอนามัย สามารถถอดและทำความสะอาดส่วนหัวซิลิโคน และที่เก็บน้ำมูกแยกกันได้ สามารถต้มภาชนะสำหรับที่เก็บน้ำมูก และซิลิโคนได้

2. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ต่อไปนี้ปรากฏในคำแนะนำสำหรับการใช้งาน

และบนอุปกรณ์

	คำเตือน คำแนะนำเพื่อเตือนว่าอุปกรณ์อาจเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความบาดเจ็บได้
	สำคัญ คำแนะนำด้านความปลอดภัยเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะทำลายอุปกรณ์/ชิ้นส่วน
	ข้อสังเกต สังเกตรายละเอียดที่สำคัญ
	อ่านคู่มือก่อนใช้งาน
	ประเภทเครื่องมือ ชนิด BF (เครื่องมือที่สัมผัสกับผู้ป่วยภายนอก)
	-ทิ้งอุปกรณ์ตามด้วยข้อกำหนด EC - WEEE (อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เสีย)
IP 22	สามารถป้องกันฝุ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 มิลลิเมตร และป้องกัน ปริมาณน้ำที่หยดเอียง 15 องศา
	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบของยุโรป และประเทศที่บังคับใช้
	ผู้ผลิต
	อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน/ขนส่ง
	อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บ
	กล่องผลิตภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ # 21 PAP แผ่นไม้อัดที่ไม่ใช้กระดาษลูกฟูก (กระดาษแข็ง)
	มาตรฐาน CE สำหรับเครื่องมือแพทย์

3. คำแนะนำ เครื่องดูดน้ำมูกเด็ก Beurer มีไว้สำหรับการกำจัดน้ำมูกจากเด็กโดยเฉพาะ

(อายุ 0 ถึง 12 ปี) ห้ามใช้เครื่องดูดน้ำมูกเด็ก สำหรับอวัยวะอื่น ๆ หรือกับสัตว์ เครื่องดูดน้ำมูกเด็ก อาจดำเนินการโดยผู้ใหญ่ ที่สามารถใช้งานอุปกรณ์ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับการใช้งานเหล่านี้ เก็บเครื่องช่วยหายใจทางจมูกให้ห่างจากเด็ก เครื่องกำจัดสารคัดหลั่งจมูกนี้ เหมาะสำหรับใช้ในบ้านส่วนตัวเท่านั้นไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเชิงพาณิชย์ เครื่องกำจัดสารคัดหลั่งจมูก อาจทำได้เพียงใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้และตามลักษณะที่ระบุไว้ตามคำแนะนำ การใช้งานในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายได้ต่อผู้ใช้ได้ และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ห้ามใช้ที่ดูดสารคัดหลั่งจมูก หากมีคำเตือนข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องกำจัดสารคัดหลั่งจมูก เหมาะสำหรับบุตรหลานของคุณหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน

4. คำเตือนและหมายเหตุเพื่อความปลอดภัย



คำเตือน

- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม ไม่มีความเสียหายกับอุปกรณ์ หากมีสิ่งผิดปกติ อย่าใช้อุปกรณ์ และติดต่อร้านค้าปลีกของคุณหรือที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุไว้ในฉลาก

- อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้ทางการแพทย์และการรักษาได้ ควรปรึกษาแพทย์ทันทีในกรณีที่มีอาการปวดหรือเจ็บป่วย
- หากเด็กมีอาการเกี่ยวกับจมูกควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้อุปกรณ์
- อย่าใช้อุปกรณ์กับผู้ที่มึนเลือดกำเดาไหล
- ห้ามใช้อุปกรณ์กับผู้ที่มีการบาดเจ็บศีรษะเฉียบพลันรวมถึงบาดเจ็บที่ใบหน้าหรือลำคอ
- ห้ามใช้อุปกรณ์กับผู้ที่มีการแข็งตัวของเลือดหรือเลือดออก

- ใช้อุปกรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำการใช้งานเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือน อาจนำไปสู่การบาดเจ็บได้ เช่นเลือดกำเดาไหล เลือดออกจากเยื่อจมูก
- อย่าใช้แรงมากเกินไปในการนำซิลิโคนใส่เข้าไปในรูจมูก
- โปรดปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยทั่วไปเมื่อใช้อุปกรณ์
- ทำความสะอาดซิลิโคนก่อนใช้งานทุกครั้ง
- หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ให้หยุดใช้ทันที
- หากรู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บปวดขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน ควรหยุดใช้ทันที
- ในระหว่างการใช้งานเครื่อง โปรดทำให้แน่ใจว่าทารกไม่ได้กลืนหายใจ ปิดปากหรือกลืนน้ำลาย สิ่งนี้อาจทำให้เกิดแรงดันอากาศซึ่งสามารถทำลายแก้วหูได้
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ที่มึนร่างกายหรือประสาทสัมผัสบกพร่อง หรือทักษะทางจิตหรือการขาดประสบการณ์และ / หรือการขาดความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยหรือได้รับคำแนะนำจากผู้ขายเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์
- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็ก
- อย่าใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิต
- ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำและห้ามใช้ในอ่างน้ำห้อง ของเหลวอาจซึมเข้าสู่อุปกรณ์
- ห้ามเปิดอุปกรณ์แก๊ซหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถรับประกันการทำงานที่เหมาะสมได้อีกต่อไป หากไม่ปฏิบัติตามนี้ คำแนะนำอาจเป็นอันตรายและไม่สามารถรับประกันได้
- หากอุปกรณ์ตกพื้น เกิดการฉีกขาดหรือได้รับความเสียหายอื่นใด จะต้องไม่ใช้อีกต่อไป หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือผู้ค้าปลีก



สำคัญ

- ปกป้องอุปกรณ์จากการกระแทกและความชื้น สิ่งสกปรก รวมถึงอุณหภูมิที่ระบุไว้ทำเครื่องหมายไว้ ป้องกันไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง อย่าทำเครื่องตก
- หากแบตเตอรี่หมดหรือคุณไม่ต้องการใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการรั่วไหล




คำเตือนเกี่ยวกับ

การจัดการแบตเตอรี่

- หากผิวหนังหรือดวงตาของคุณสัมผัสกับของเหลวในแบตเตอรี่ ให้ล้างออกบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้วยน้ำสะอาด และขอความช่วยเหลือทางการแพทย์
- อันตรายจากการสำลัก! เด็ก ๆ สามารถกลืนและสำลักได้

- ควรเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก
- สังเกตเครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) ขั้ว หากแบตเตอรี่รั่วไหล ให้สวมถุงมือป้องกัน และทำความสะอาดช่องใส่แบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้ง

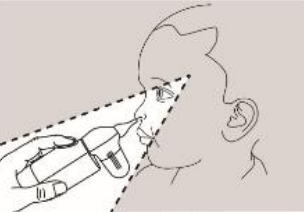


- ป้องกันแบตเตอรี่จากความร้อนสูงเกินไป
- เสี่ยงต่อการระเบิด! อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่หรือลัดวงจร
- หากไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่

- ใช้แบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในฉลากเท่านั้น
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดในเวลาเดียวกันเสมอ
- อย่าใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
- อย่าถอดประกอบเปิดหรือปิดแบตเตอรี่

5. คำอธิบายอุปกรณ์

1. ซิลิโคนที่แนบมา
2. ส่วนหัว
3. ปุ่มเปิด / ปิด
4. ช่องใส่แบตเตอรี่
5. ที่เก็บสารคัดหลั่งจุ่ม
6. ที่ยึดซิลิโคนกว้างเหมาะสำหรับการกำจัดสารคัดหลั่งจุ่มที่เป็นของแข็ง
7. ที่ยึดซิลิโคนแบบบาง เหมาะสำหรับการกำจัดสารคัดหลั่งจุ่มที่เป็นของเหลวมากขึ้น

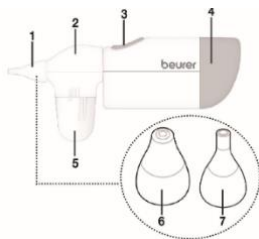


6. การใช้งานครั้งแรก

ใส่แบตเตอรี่ในการใช้งานอุปกรณ์ที่หามาพร้อมอุปกรณ์ (แบตเตอรี่ AA ขนาด 2 x 1.5 V)

1. ดึงฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่บนอุปกรณ์ให้ร่อนเบาๆ ที่ด้านล่างของอุปกรณ์เพื่อทำสิ่งนี้จับอุปกรณ์ในแนวตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หลุดออก



2. ใส่แบตเตอรี่ทั้งสองก้อนลงในแบตเตอรี่ช่องตามขั้วที่ระบุ (+/-)
3. ใส่ฝากลับเข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่ให้ล็อกเข้าที่

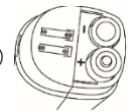


7. การรักษา

1. เลือกซิลิโคนที่คุณต้องการ



การยึดซิลิโคนแบบกว้างเหมาะสำหรับการกำจัดสารคัดหลั่งจุ่มที่แข็งมากขึ้น
การยึดซิลิโคนแบบบางเหมาะสำหรับการกำจัดสารคัดหลั่งจุ่มที่เป็นของเหลวมากขึ้น

2. วางตำแหน่งซิลิโคนที่เลือก ไว้ที่ปลายส่วนหัวของอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่จนสุดซิลิโคน
3. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้องก่อนที่จะใส่เข้าไปไปที่จุ่ม ในการดำเนินการดังกล่าวให้กดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้สั้น ๆ
4. จับหรือวางเด็กที่จะรับการรักษาในท่า

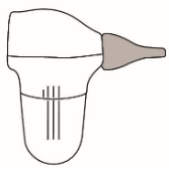

ตั้งตรงหรือ ในตำแหน่งที่พวกเขาเอียงเล็กน้อย อย่าใช้อุปกรณ์นี้เมื่อเด็กที่จะเข้ารับการรักษาบ้วนหรือนำส่วนปลายของซิลิโคนเข้าไปในรูจมูกหรือชิดกับเยื่อโพรงจมูกอย่างระมัดระวัง การยึดปลายซิลิโคนไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปในจมูกจนสุด ในระหว่างการรักษาให้ถืออุปกรณ์

ที่มุม 20 ° ถึง 60 ° จากใบหน้า



5. กดปุ่มเปิด / ปิด ค้างไว้เพื่อเปิดอุปกรณ์ ตอนนี้ดูดสารคัดหลั่งจุ่มออกจากจมูก แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสารคัดหลั่งจุ่มเข้าไปในวาล์ว
6. ทำซ้ำที่รูจมูกอีกข้างหรือตามความจำเป็น หากเด็กรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวด ให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันที" ปกติจะหยุดใช้เมื่อบรรจสารคัดหลั่งจุ่มเต็มบรรทัด "MAX"
7. ในการสิ้นสุดการใช้งานให้ปล่อยปุ่มเปิด / ปิด
8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน

8. การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค



สำคัญ

ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานมิฉะนั้นอาจเกิดการอุดตัน และจะไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ราบรื่นและถูกสุขอนามัยได้

1. ถอดซิลิโคนที่ใช้และส่วนหัวออกจากอุปกรณ์
2. บิดภาชนะที่เก็บสารคัดหลั่งจุ่มตามเข็มนาฬิกา (หมุนครึ่งหนึ่ง) จากนั้นดึงลงและปิด
3. เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ ซิลยาง (1) และวาล์ว (2) จากเฮตยูนิท เพื่อไม่ให้แบคทีเรียสะสมเกิดขึ้น
4. ทำความสะอาดสิ่งที่แนบซิลิโคน, ภาชนะสำหรับการเก็บสารคัดหลั่งจุ่ม, ฝาจุ่มและวาล์วด้วยน้ำร้อนและสบู่อ่อน ๆ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่รุนแรงใด ๆ ในการฆ่าเชื้อซิลิโคนที่แนบมาและที่เก็บสารคัดหลั่งจุ่มให้วางไว้ในน้ำเดือดประมาณ 3 ถึง 5 นาที ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนและฐานที่ร้อนของ

ซิลิโคน วางส่วนประกอบแต่ละชิ้นบนพื้นผิวที่แห้งสะอาดและดูดซับ ปล่อยให้แห้งสนิท (อย่างน้อย 4 ชั่วโมง)

5. ทำความสะอาดเฮตยูนิทด้วยน้ำเท่านั้น อย่าใช้สบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารเคมีเนื่องจากอาจอุดตันส่วนปลายของชุดหัว
6. ทำความสะอาดอุปกรณ์หลักด้วยผ้าแห้งที่สะอาดเท่านั้น ห้ามใช้ไต้ ๆ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสารละลายหรือเบนเซน ต้องไม่ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการแช่อยู่ในน้ำ

7. การใช้อวาล์วที่สกปรกหรือชำรุดสามารถลดแรงกดดูดได้ ของเครื่องช่วยกำจัดสารคัดหลั่งจุ่ม ต้องเปลี่ยนวาล์วทันทีที่คุณสังเกตเห็นว่าวาล์วสกปรกหรือเสียหาย นอกจากนี้วาล์วจะต้องแห้งสนิทหลังจากทำความสะอาดเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้

8. เช็ดชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้งโดยใช้ผ้าแห้งสะอาด อย่าประกอบชิ้นส่วนจนกว่าจะแห้งสนิท จัดเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากแสงแดดฝุ่นและความชื้น

9. การกำจัดอุปกรณ์ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งอุปกรณ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนเมื่อหมดอายุการใช้งาน ทั้งอุปกรณ์ที่จุ่มรวบรวมหรือรีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสมในประเทศของคุณ ทั้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบในการกำจัดขยะ

การกำจัดแบตเตอรี่

- ต้องกำจัดแบตเตอรี่ทั้งหมด
- กล่องเก็บรวบรวมจุดรีไซเคิลหรือร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ
- คุณมีความจำเป็นตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่
- รหัสด้านล่างนี้พิมพ์บนแบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบย่อยที่เป็นอันตราย stances: Pb = แบตเตอรี่มีตะกั่ว

Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมียม

Hg = แบตเตอรี่มีปรอท